

Hable One Funktionshandbuch Android

Einführung	4
Spezielle Hable One Shortcuts	4
TalkBack abspielen und pausieren	4
TalkBack-Menü	4
TalkBack einschalten	4
Android Menü App Öffner	4
Navigation	4
Weiter zum nächsten Objekt	4
Zum vorigen Objekt gehen	5
Zum Objekt darunter gehen	5
Zu Objekt darüber gehen	5
Wählen Sie ein Objekt aus	5
Zurückgehen	5
Startbildschirm	5
Zum ersten Element auf dem Bildschirm springen	5
Zum letzten Element auf dem Bildschirm springen	5
Aktionen anzeigen	5
Schnellzugriff Shortcuts	5
Benachrichtigungen	5
Abspielen oder Anhalten von Medien	5
Statusleiste	5
HaltenSie 2, 3 und 4 (s)	5
Google Now	5
Objekt lange drücken	6
Letzte Apps / App-Auswahl	6
Bildschirmfoto	6
Leseabkürzungen	6
Vom nächsten Objekt lesen	6
Von oben lesen	6
Tastaturkürzel	6
Suche auf dem Bildschirm	6
	1

Halten Sie 1, 2 und 4 (f)	6
Tastatur wechseln	6
Bildschirm sperren	6
Ton	6
Medien stumm schalten	6
Lautstärke senken (wiederholbar)	6
Lautstärke erhöhen (wiederholbar)	6
Registerkarten	7
Registerkarte schließen	7
Neue Registerkarte	7
Nächste Registerkarte (im Browser)	7
letzte Registerkarte (im Browser)	7
Android Menü App Öffner	7
Rechner öffnen	7
Browser öffnen	7
Kalender öffnen	7
Offene Kontakte	7
Post öffnen	7
Karten öffnen	7
Offene Musik	7
Offene SMS	7
Tippen	8
Buchstaben tippen	8
Tippen von Abkürzungen	8
Leerzeichen	8
Rücktaste	8
Rücktaste für ein Wort	8
Eingabe (oder neue Zeile)	8
Umschalttaste Eingabetaste	8
Zahlen	8
Großbuchstaben	8
Feststelltaste für ein ganzes Wort	8
Textbearbeitung 1 - Navigieren in einem Textfeld	8
Abkürzungen ein- oder ausschalten (zum Tippen)	8
Nächstes Zeichen	8
Vorheriges Zeichen	9

Einzelnes Zeichen rechts auswählen	9
Einzelnes Zeichen links auswählen	9
Nächste Zeile auswählen	9
Vorherige Zeile auswählen	9
An den Anfang der Zeile springen	9
Zum Ende der Zeile springen	9
Zum Anfang des Absatzes springen	9
Zum Ende des Absatzes springen	9
Zum Anfang der Seite springen (im Browser)	9
Zum Ende der Seite springen (im Browser)	9
Weiter zur nächsten Tabelle	9
Zur vorherigen Tabelle gehen	9
Alles auswählen	9
Textbearbeitung 2 - Funktionen mit markiertem Text	10
Kopieren	10
Einfügen	10
Ausschneiden	10
Fettgedruckter Text	10
Kursiver Text	10
Text unterstreichen	10
Rückgängig machen	10
Wiederholen	10
Neu machen	10
Suche im Dokument	10
Drucken	10
Hable Menü	10
Öffnen Sie das Hable Menü	10
Betriebssystem als Android einstellen	10
Betriebssystem als iOS einstellen	11
Entfernen Sie alle Bluetooth-Verbindungen	11
Legen Sie die Dauer der "Haltezeit" fest	11
Tauschen Sie Taste 1 gegen Taste 3 und Taste 4 gegen Taste 6 aus.	11
Setzen Sie die Sprache auf Niederländisch	11
Setzen Sie die Sprache auf Flämisch (Belgien)	11
Stellen Sie die Sprache auf Englisch (UEB)	11
Setzen Sie die Sprache auf Französisch	11
Setzen Sie die Sprache auf Deutsch	11
Setzen Sie die Sprache auf Spanisch	11
	3

Setzen Sie die Sprache auf Dänisch	11
Batteriestatus des Hable One	11
Produktspezifikationen	11
Gewicht	12
Abmessungen (L.B.H.)	12
OS-Unterstützung	12
Braille-Eingabe-Tasten	12
Unterstützte Sprachen	12
Schnittstellen & Ports	12
Batterie	12
Lebensdauer der Batterie	12
Methode der Aufladung	12
Aufladezeit	12
Umweltbedingungen	12
Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften	13
Erklärungen zur Einhaltung von Rechtsvorschriften	14

Einführung

Dies ist ein kurzer Überblick über alle Funktionen, die das Hable One ausführen kann. Ausführlichere Erklärungen zu den Funktionen finden Sie in den Trainingshandbüchern. Sie können durch die Überschriften navigieren, um genau das zu finden, wonach Sie suchen, oder benutzen Sie Strg+f.

Spezielle Hable One Shortcuts

[TalkBack abspielen und pausieren](#)

Halten Sie 1

[TalkBack-Menü](#)

Halten Sie 2 und 4

[TalkBack einschalten](#)

Halten Sie 1, 2, 3 und 8

Halten Sie die Tasten erneut gedrückt, um TalkBack wieder auszuschalten.

[Android Menü App Öffner](#)

Halten Sie 3

Navigation

[Weiter zum nächsten Objekt](#)

Halten Sie 7 und drücken Sie 8

Zum vorigen Objekt gehen

8 halten und 7 drücken

Zum Objekt darunter gehen

Halten Sie 7 und drücken Sie dann 6.

Zu Objekt darüber gehen

Halten Sie 6, dann drücken Sie 7

Wählen Sie ein Objekt aus

Drücken Sie 7 und 8

Zurückgehen

Halten Sie 1 und 2 (b)

Startbildschirm

Halten Sie 1, 2 und 5 (h)

Zum ersten Element auf dem Bildschirm springen

Halten Sie 1, 2 und 3

Zum letzten Element auf dem Bildschirm springen

Halten Sie 4, 5 und 6

Aktionen anzeigen

Halten Sie 1 und 6

Schnellzugriff Shortcuts

Benachrichtigungen

Halten Sie 1, 3, 4 und 5 (n)

Abspielen oder Anhalten von Medien

Halten Sie 1, 2, 3 und 4 (p)

Statusleiste

Halten Sie 2, 3 und 4 (s)

Google Now

Halten Sie 1, 4 und 5

Objekt lange drücken

Halten Sie 3 und 8

Letzte Apps / App-Auswahl

Halten Sie 2 und 3

Um die letzten Anwendungen zu schließen, können Sie mit zwei Fingern nach oben wischen.

Bildschirmfoto

Halten Sie 3 und 6

Leseabkürzungen

Vom nächsten Objekt lesen

Halten Sie 1, 2, 3 und 5 (r)

Von oben lesen

Halten Sie 2, 4, 5 und 6

Tastaturkürzel

Suche auf dem Bildschirm

Halten Sie 1, 2 und 4 (f)

Tastatur wechseln

Halten Sie 1, 5 und 6

Bildschirm sperren

Halten Sie 2 und 5

Ton

Medien stumm schalten

Halten Sie 1, 3 und 4

Lautstärke senken (wiederholbar)

Halten Sie 1, 2 und 6

Lautstärke erhöhen (wiederholbar)

Halten Sie 3, 4 und 5

Registerkarten

Registerkarte schließen

Halten Sie 2, 3 und 5

Neue Registerkarte

Halten Sie 2, 5 und 6

Nächste Registerkarte (im Browser)

Halten Sie 2, 3, 4 und 5

letzte Registerkarte (im Browser)

Halten Sie 1, 2, 5 und 6

Android Menü App Öffner

Für alle diese Verknüpfungen müssen Sie zunächst die App-Kategorie Opener starten, indem Sie die Taste 3 gedrückt halten.

Rechner öffnen

Halten Sie 1

Browser öffnen

1 und 2 halten

Kalender öffnen

1, 2 und 3 halten

Offene Kontakte

1 und 4 halten

Post öffnen

1 und 5 halten

Karten öffnen

1, 3 und 4 halten

Offene Musik

1, 2, 3, 4 halten

Offene SMS

2, 3 und 4 halten

Tippen

Buchstaben tippen

Die Buchstaben entsprechen dem Braille-Alphabet

Tippen von Abkürzungen

Abkürzungen funktionieren genauso wie die UEB Grad 1 Braille-Schrift

Leerzeichen

Drücken Sie 8

Rücktaste

Drücken Sie 7

Rücktaste für ein Wort

Drücken Sie 5 und 7

Eingabe (oder neue Zeile)

1 und 8 drücken

Umschalttaste Eingabetaste

Drücken Sie 2 und 8

Zahlen

Drücken Sie zuerst 3,4,5,6, um die Zahlen zu aktivieren. Die Zahlen entsprechen der Blindenschrift. Um zur Eingabe von Buchstaben zurückzukehren, drücken Sie die Taste 8 für die Leertaste und fahren Sie fort.

Großbuchstaben

Drücken Sie zunächst die Tasten 4 und 6, gefolgt von dem Buchstaben, den Sie eingeben möchten. Der darauf folgende Buchstabe wird automatisch wieder klein geschrieben.

Feststelltaste für ein ganzes Wort

Drücken Sie zuerst 4 und 5, gefolgt von dem Wort, das Sie mit Feststelltaste eingeben möchten. Die Feststelltaste wird nach einem Leerzeichen automatisch deaktiviert.

Textbearbeitung 1 - Navigieren in einem Textfeld

Abkürzungen ein- oder ausschalten (zum Tippen)

Halten Sie 1, 2, 4 und 5 (g)

Nächstes Zeichen

Halten Sie 7 und drücken Sie 4

Vorheriges Zeichen

4 halten und 7 drücken

Einzelnes Zeichen rechts auswählen

Halten Sie 7 und drücken Sie 4 und 5

Einzelnes Zeichen links auswählen

4 und 5 gedrückt halten und 7 drücken

Nächste Zeile auswählen

Halten Sie 7 und drücken Sie 5 und 6

Vorherige Zeile auswählen

5 und 6 gedrückt halten und 7 drücken

An den Anfang der Zeile springen

Halten Sie 1, 4, 5 und 6

Zum Ende der Zeile springen

Halten Sie 3, 4, 5 und 6

Zum Anfang des Absatzes springen

Halten Sie 1, 2 und 3

Zum Ende des Absatzes springen

Halten Sie 4, 5 und 6

Zum Anfang der Seite springen (im Browser)

Halten Sie 2, 3 und 6

Zum Ende der Seite springen (im Browser)

Halten Sie 3, 5 und 6

Weiter zur nächsten Tabelle

Drücken Sie 2, 3, 4, 5 und 8

Zur vorherigen Tabelle gehen

Drücken Sie 2, 3, 4, 5 und 7

Alles auswählen

Halten Sie 2, 3, 5 und 6

Textbearbeitung 2 - Funktionen mit markiertem Text

Kopieren

Halten Sie 1 und 4 (c)

Einfügen

Halten Sie 1, 2, 3 und 6 (v)

Ausschneiden

Halten Sie 1, 3, 4 und 6 (x)

Fettgedruckter Text

Halten Sie 1, 2 und 8

Kursiver Text

Halten Sie 1, 3 und 8

Text unterstreichen

Halten Sie 2, 3 und 8

Rückgängig machen

Halten Sie 1, 3, 5 und 6 (z)

Wiederholen

Halten Sie 1, 3, 4, 5 und 6 (y)

Neu machen

Halten Sie 2, 3, 4, 5 und 6

Suche im Dokument

Halten Sie 1, 2, 4, 5 und 6

Drucken

Halten Sie 1, 2, 3, 4 und 8

Hable Menü

Öffnen Sie das Hable Menü

Halten Sie 1, 2, 3, 4, 5 und 6

Alle folgenden Funktionen funktionieren nur, wenn Sie das Hable-Menü aufrufen. Nachdem eine Funktion ausgeführt wurde, verlassen Sie automatisch das Hable-Menü.

Betriebssystem als Android einstellen

Halten Sie 1 (Sie spüren 3 Vibrationen)

Betriebssystem als iOS einstellen

Halten Sie 2 (Sie spüren 2 Vibrationen)

Entfernen Sie alle Bluetooth-Verbindungen

Halten Sie 1, 2, 3 und 5 (r)

Legen Sie die Dauer der "Haltezeit" fest

Halten Sie 1, 2 und 3 (l)

4 Vibrationen bedeuten, dass Sie die Tasten am längsten gedrückt halten müssen, eine Vibration bedeutet die kürzeste Haltezeit.

Tauschen Sie Taste 1 gegen Taste 3 und Taste 4 gegen Taste 6 aus.

Halten Sie 1, 3, 4 und 6 (x)

Setzen Sie die Sprache auf Niederländisch

Halten Sie 1, 4 und 5 (d)

Setzen Sie die Sprache auf Flämisch (Belgien)

Halten Sie 1 und 2 (b)

Stellen Sie die Sprache auf Englisch (UEB)

Halten Sie 1 und 5 (e)

Setzen Sie die Sprache auf Französisch

Halten Sie 1, 2 und 4 (f)

Setzen Sie die Sprache auf Deutsch

Halten Sie 1, 2, 4 und 5 (g)

Setzen Sie die Sprache auf Spanisch

Halten Sie 2, 3 und 4 (s)

Setzen Sie die Sprache auf Dänisch

Halten Sie 1, 3, 4 und 5 (n)

Batteriestatus des Hable One

Halten Sie 3 und 6

- 3 Vibrationen: Hoher Batteriestand.
- 2 Vibrationen: Mittlerer Batteriestand.
- 1 Vibration: Niedriger Batteriestand.

Produktspezifikationen

Gewicht

100 Gramm

Abmessungen (L.B.H.)

120 × 65 × 32 mm

OS-Unterstützung

iOS (iPhone & iPad): Sprachausgabe

Android: TalkBack

Mac OS: Unterstützung beim Schreiben

Windows: Unterstützung beim Schreiben

Braille-Eingabe-Tasten

Sechs-Punkt-Braille-Eingabe

Unterstützte Sprachen

UEB (kontrahiert; nicht kontrahiert), Niederländisch, Deutsch, Französisch

Schnittstellen & Ports

Ein Micro USB-C, Firmware-Upgrades und Batteriespeicher, Bluetooth V5, Schiebeschalter

Batterie

Nicht austauschbarer Lithium-Ionen-Akku

Lebensdauer der Batterie

14 Tage bei typischer Nutzung

Methode der Aufladung

PC-Ladegerät: Aufladen über USB-Anschluss - 5 V, 500 mA Max Wandladegerät: Aufladen über USB-Anschluss - 5 V, 1000 mA Max;

Aufladezeit

Das Hable One ist in etwa 3 Stunden vollständig aufgeladen.

Umweltbedingungen

Betrieb

Temperatur: fünf °C bis 45 °C

Luftfeuchtigkeit: 10% - 70% relative Luftfeuchtigkeit Lagerung

Temperatur: -15 °C bis 70 °C Luftfeuchtigkeit: 5% - 90% relative Luftfeuchtigkeit

Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften

Vielen Dank, dass Sie das Hable One™-Produkt (das Produkt) erworben haben. Mit diesem Dokument möchten wir Sie über die Sicherheits-, Konformitäts- und Garantieaspekte des Produkts informieren.

Wichtige Sicherheitshinweise

Allgemeine Warnungen



Lesen, behalten und befolgen Sie diese Anweisungen.

Beachten Sie alle Warnungen.

Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser. Es besteht die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags.

Die im Produkt und in der Batterie enthaltenen Stoffe können bei unsachgemäßer Handhabung und Entsorgung die Umwelt schädigen oder Verletzungen verursachen.

Nur mit einem trockenen Tuch reinigen. Verwenden Sie keine Scheuermittel.

Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.

Verwenden oder entsorgen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen. Schalten Sie das Produkt aus, wenn es sich warm oder heiß anfühlt.

Verwenden Sie nur Zubehör, das von Hable angegeben oder mit dem Produkt verkauft wird (z. B. ein USB-C-Kabel).

Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Öffnen Sie das Produkt nicht selbst. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Produkt in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn der Ladeanschluss defekt ist oder wenn Flüssigkeit über das Produkt verschüttet wurde.

Das Produkt darf nicht von Personen unter 8 Jahren verwendet werden.

Lang andauernde, sich wiederholende Bewegungen mit dem Produkt können zu Nerven-, Sehnen- oder Muskelverletzungen in Ihren Händen, Handgelenken, Armen, Schultern, Nacken oder Rücken führen. Wenden Sie sich bei Schmerzen, Taubheit, Schwäche, Schwellungen, Brennen, Krämpfen, Steifheit oder anderen medizinischen Beschwerden, die bei der Verwendung des Produkts auftreten können, an eine qualifizierte medizinische Fachkraft.

Spezifische Batteriewarnung

Versuchen Sie nicht, die Batterie zu ersetzen, das Gehäuse zu öffnen oder das Produkt selbst zu zerlegen. Andernfalls erlischt die Garantie und es kann zu einem Sicherheitsrisiko kommen. Wenn das Produkt nicht mehr lädt, wenden Sie sich bitte an den Hable-Kundendienst, um Informationen zur Reparatur oder zum Austausch zu erhalten.

Informationen zu Entsorgung und Recycling

Aufgrund der im Produkt enthaltenen Batterie darf das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.



Erklärungen zur Einhaltung von Rechtsvorschriften



Hable ist berechtigt, das UKCA-Zeichen auf dem Produkt anzubringen. Die folgenden Richtlinien und Normen wurden angewandt:

2011/65/EU

2012/19/EU

2006/66/EG

1907/2006

2014/53/EU

Garantie

Die eingeschränkte Gewährleistungspolitik (LWP) für Hable One Produkte gilt für die Lieferung des Produkts. Unter der Voraussetzung, dass für Kunden (jede natürliche Person, die zu Zwecken handelt, die nicht ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zuzuordnen sind) nach britischem Recht die Gewährleistungsfrist (wie im LWP definiert) sechs Jahre in England, Wales und Nordirland und fünf Jahre in Schottland beträgt. Der Kunde kann wählen, welche Garantieleistungen (wie in den LWP definiert) er in Anspruch nehmen möchte. Während der Reparatur oder des Austauschs des Produkts ist die Gewährleistungsfrist ausgesetzt.