


PREMIUM

LA NUOVA FRONTIERA
DELL'EPILAZIONE LASER

[comfort zone]
conscious skin science

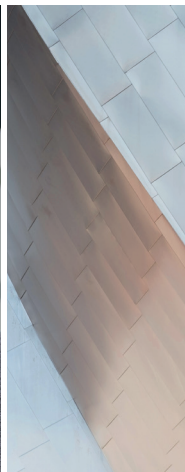

PREMIUM

L'EPILAZIONE PERFETTA, PER OGNI FOTOTIPO



LASER AL DIODO AD ALTA POTENZA CON TECNOLOGIA IOT MADE IN ITALY. SICURO, PIACEVOLE, EFFICACE

Grazie alla modalità **innovativa** di miscelazione ed emissione simultanea di **due lunghezze d'onda, 808 e 1064nm**, PREMIUM offre un'epilazione progressiva **permanente di ultima generazione**.

La possibilità di **personalizzare i parametri di ogni singola seduta** garantisce un'epilazione **sicura e perfetta su tutti i fototipi**, in breve tempo.

Facile e pratico da utilizzare, con un unico manopolo dotato di **testina in cristallo di zaffiro** che assicura **massimo comfort durante il trattamento**.

Elegante e sostenibile grazie al design ad esclusiva [comfort zone] e all'utilizzo della scocca di **materiale MDF soft touch in cellulosa da foreste certificate FSC**.



PREMIUM


COME FUNZIONA IL LASER AL DIODO



L'azione con cui la luce laser **agisce progressivamente** sui bulbi **piliferi**, **chiamata fototermolisi selettiva**, **consiste nella trasformazione della luce in calore**. Questa energia termica rende inattivi i follicoli piliferi nel tempo, fino alla completa inibizione della loro capacità di rigenerazione dei peli.

La lunghezza d'onda 808 ha un moderato assorbimento della melanina e un'azione **specificata sul follicolo**.

La lunghezza d'onda 1064 YAG ha un basso assorbimento della melanina e **garantisce una foto-epilazione ancora più profonda**, raggiungendo, oltre il bulbo, anche la papilla.

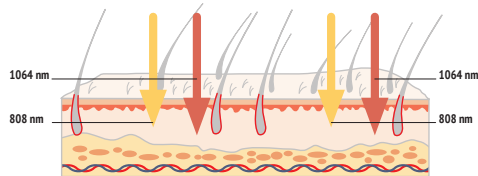

COME SI OTTIENE IL MIGLIOR TRATTAMENTO DI EPILAZIONE LASER



LA LUNGHEZZA D'ONDA

Il **target** e l'**assorbimento** delle diverse molecole del pelo (melanina) bersaglio su cui le particelle del raggio laser riversano la loro energia **dipende dal tipo di lunghezza d'onda**.



LA DURATA DELL'IMPULSO

L'**impulso** deve garantire la **salvaguardia dei tessuti** grazie ad un **software** in grado di **regolare automaticamente la durata** dello spot in sintonia con frequenza ed energia.



LA DENSITÀ ENERGETICA

L'energia deve essere sufficiente per **provocare il collasso del capillare arterioso** della papilla.



IL TIPO DI RAFFREDDAMENTO

La testina e l'impianto di raffreddamento sono estremamente importanti per il **comfort durante il trattamento** e per **evitare scottature**.



PREMIUM

I 4 PUNTI DI FORZA



Manipolo unico con doppia lunghezza d'onda (808-1064 nm) per offrire ai diversi fototipi e alle diverse caratteristiche dei peli risultati «premium».



Durata dell'impulso 3-150 millisecondi, per garantire la massima sicurezza ed efficacia.

Frequenza dell'impulso 1 ~ 15 Hz, per la migliore personalizzazione del trattamento.



Densità energetica 3 ~ 35 J/cm², il più alto livello in ambito estetico, perfetto per ottenere risultati su tutti i tipi di pelo in totale sicurezza.



Raffreddamento ad impianto dinamico e costante per una minore rumorosità e un maggior comfort paziente.

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
Testina del manipolo in Cristallo in Zaffiro per un elevato raffreddamento e per aumentare il comfort del trattamento evitando scottature.

PREMIUM

LA NUOVA FRONTIERA DELL'EPILAZIONE LASER

RISULTATI VISIBILI GIÀ DAL PRIMO TRATTAMENTO.
PERCORSI CONSIGLIATI DI 8-10 TRATTAMENTI
PER RISULTATI "PREMIUM".

PRENOTA IL TUO
PROGRAMMA PERSONALIZZATO
PRESSO



[comfort zone]

Scopri di più sui nostri prodotti, trattamenti e consigli lifestyle su
www.comfortzoneskin.com