

„...weil Mobilität
Freiheit bedeutet!“



Bedienungsanleitung Auffahrrampen



Für weitere Verwendung aufbewahren !


BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die Rampe darf nur mit Rollstühlen und Elektromobilen befahren werden. Alle anderen Verwendungszwecke sind ausgeschlossen.

Das Befahren darf nur mit Hilfe einer Begleitperson erfolgen, die jedoch die Rampe nicht betreten darf. Diese Person darf keine körperlichen Einschränkungen haben.

AUFBAU DER AUFFAHRRAMPEN

- Legen Sie die Rampe auf den Boden bzw. auf die Stufe. Achten Sie darauf, dass die Rampe kippstabil aufliegt.
- Achten Sie darauf, dass die Auflage komplett auf der Stufe aufliegt.
- Wiederholen Sie die Schritte für die zweite Rampe.
- Positionieren Sie die Rampen parallel zueinander, entsprechend dem Abstand der Rollstuhlräder, wobei die Räder in der Mitte der jeweiligen Rampe laufen müssen.

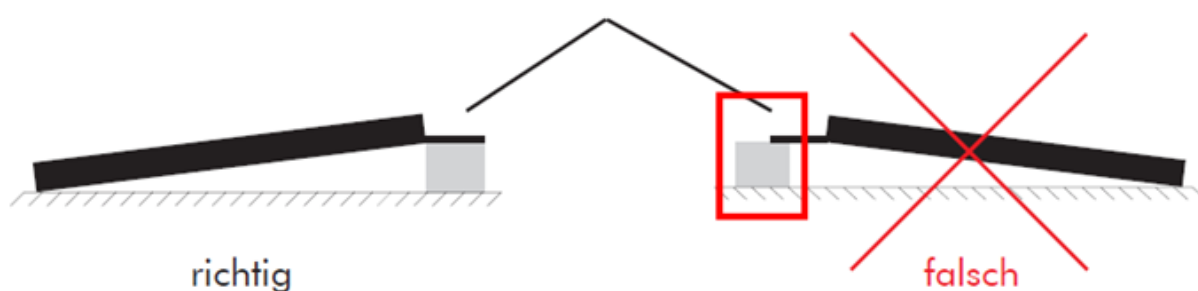



„...weil Mobilität
Freiheit bedeutet!“

WARTUNG UND PFLEGE

- Überprüfen Sie regelmäßig die Rampe auf Risse oder Ausbeulungen. Sollte Sie eine Beschädigung feststellen, darf die Rampe nicht benutzt werden. Wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler.
- Die Lauffläche der Rampe muss vor jeder Benutzung von Verschmutzungen durch z.B. Laub oder Sand befreit werden.
- Eine Reinigung kann mit Hilfe von Wasser und einem handelsüblichen Haushaltsreinger erfolgen. Benutzen Sie keine harten Bürsten oder andere harte Gegenstände wie z.B. Stahlwolle. Dies würde die Oberfläche zerstören.

Ihr Fachhändler

© 2013 Lehmann Rollstuhlrampen & Hebelifte . Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



„...weil Mobilität
Freiheit bedeutet!“



Lehmann Rollstuhlrampen & Hebelifte
Schützenplatz 5a

D - 28790 Schwanewede

Tel: +49 (0) 421-24 10 50 • Fax: +49 (0) 421-24 10 515
info@rollstuhlrampen.de • www.rollstuhlrampen.de