




mylife YpsoPump avvisi e allarmi


Avvisi visualizzati sul display




Livello cartuccia basso

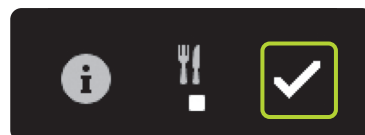

Bolo annullato

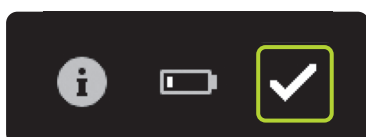


Batteria quasi scarica

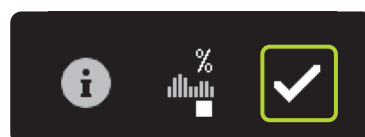

Funzione basale temporanea annullata



Ritorno del pistone non completato

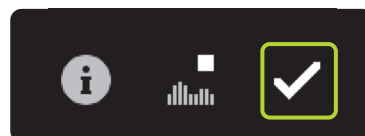

Arresto microinfusore



Priming non completato



Connessione Bluetooth® fallita



- Gli avvisi non comportano l'annullamento dell'erogazione dell'insulina.
- Gli avvisi compaiono sulla schermata di stato e devono essere confermati.
- Gli avvisi visualizzati sul display sono principalmente tattili e acustici, con 4 livelli di escalation, ad intervalli di 30 minuti ciascuno.

Livelli di escalation degli avvisi:

Livello 1: Avviso tattile

Livello 2: Avviso tattile e debole segnale acustico

Livello 3: Avviso tattile e intenso segnale acustico

Livello 4: Avviso tattile e più intenso segnale acustico




Allarmi



Manca batteria



Occlusione

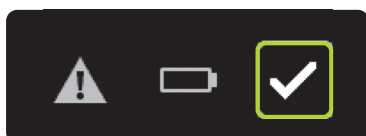

Batteria scarica



Carica batteria interna ricaricabile



Batteria non idonea



Stop automatico



Manca insulina



Errore elettronico

Fase 1: Scollegare il set di infusione dal corpo e rimuovere la batteria alcalina dal vano batteria.



Cartuccia vuota



Errore elettronico

Fase 2: Poi premere il pulsante attivatore per 2 secondi. Il microinfusore è ora privo di batteria e in stato di non utilizzo. Per rimettere in funzione il microinfusore eseguire le operazioni descritte a pagina 37 e controllare le proprie impostazioni della terapia. Sostituire la cartuccia e il set di infusione seguendo la procedura descritta a pagina 95.



Gli allarmi comportano sempre un annullamento dell'erogazione dell'insulina.

- Gli allarmi appaiono sul display e devono essere confermati ed eseguiti.
- Gli allarmi sono principalmente tattili e acustici, con 4 livelli di escalation, ad intervalli di 5 minuti ciascuno. Se un allarme viene confermato, ma non risolto, viene attivato nuovamente sia a livello acustico che tattile dopo 30 minuti.

Livelli di escalation degli allarmi:

Livello 1: Avviso tattile

Livello 2: Avviso tattile e debole segnale acustico

Livello 3: Avviso tattile e intenso segnale acustico

Livello 4: Avviso tattile e più intenso segnale acustico

Esclusione di responsabilità: mylife e mylife YpsoPump sono marchi registrati di Ypsomed AG. // Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., e il loro uso da parte di Ypsomed è concesso in licenza. Altri nomi e marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari. // Il contenuto ha esclusivamente scopo informativo e non intende sostituirsi alla consulenza, alla diagnosi o al trattamento di medici professionisti. Consultare sempre il proprio medico o operatore sanitario qualificato.