



**Ypso**Pump®

# Présentation des icônes



Lire le guide de l'utilisateur

**Numéro gratuit: 0800 44 11 44**

**Pour en savoir plus, visitez le site:**  
**[www.mylife-diabetescare.ch](http://www.mylife-diabetescare.ch)**

Ypsomed AG // Marché suisse //  
Weissensteinstrasse 26 // 4503 Soleure



Ypsomed AG  
CH-3401 Burgdorf  
Switzerland  
[www.ypsomed.com](http://www.ypsomed.com)



**YPSOMED**  
SELF CARE SOLUTIONS

### Aides à la navigation



Annuler



Avancer



Confirmer



Remonter le menu d'un niveau



Avancer pour déverrouiller



Reculer d'une étape

### Icônes d'avertissement



Niveau de cartouche faible



Bolus annulé



Niveau de charge de la pile faible



Fonction de débit basal temporaire terminée ou annulée



Retour incomplet du piston



Pompe à insuline en mode suspension



Amorçage inachevé



Échec de la connexion Bluetooth®

### Icônes générales



Avertissement



Niveau de charge de la pile



Amorçage de la tubulure en cours



Couplage Bluetooth® en cours



Alarme



Pile retirée



Amorçage de la canule en cours



Appuyer sur le bouton de commande pendant 2 secondes



Signal sonore



Retirer la pile



Déconnecter le dispositif de perfusion de votre corps



Quantité totale d'insuline par jour (basal et bolus)



Signal de vibration



Retour du piston en cours



Prêt pour couplage Bluetooth®

## Icônes du menu principal et des sous-menus

|                                                                                  |                                    |                                                                                   |                                                               |                                                                                   |                                               |                                                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Bolus                              |  | Fonction de débit basal temporaire activée/annuler            |  | Mode administration/passer au mode suspension |  | Rotation de l'écran         |
|  | Bolus standard                     |  | Remplacement de la cartouche et niveau actuel de la cartouche |  | Mode suspension/passer au mode administration |  | Bluetooth® actif/désactiver |
|  | Bolus prolongé                     |  | Retour du piston                                              |  | Paramètres                                    |  | Bluetooth® inactif/activer  |
|  | Bolus mixte                        |  | Amorcer le dispositif de perfusion                            |  | Heure                                         |  | Couplage Bluetooth®         |
|  | Débits basaux                      |  | Amorcer la tubulure                                           |  | Date                                          |                                                                                     |                             |
|  | Profil de débit basal A            |  | Amorcer la canule                                             |  | Régler l'incrément de bolus                   |                                                                                     |                             |
|  | Profil de débit basal B            |  | Historiques                                                   |  | Bolus direct actif/désactiver                 |                                                                                     |                             |
|  | Passer au profil de débit basal A  |  | Historique de traitement                                      |  | Bolus direct inactif/activer                  |                                                                                     |                             |
|  | Passer au profil de débit basal B  |  | Historique des alarmes                                        |  | Verrouillage de l'accès actif/désactiver      |                                                                                     |                             |
|  | Fonction de débit basal temporaire |                                                                                   |                                                               |  | Verrouillage de l'accès inactif/activer       |                                                                                     |                             |

## Icônes d'alarme

|                                                                                     |                                          |                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Pas de pile                              |  | Pas d'insuline      |
|  | Pile déchargée                           |  | Cartouche vide      |
|  | Pile inadaptée                           |  | Arrêt automatique   |
|  | Charger la batterie interne rechargeable |  | Erreur électronique |
|  | Occlusion                                |                                                                                     |                     |



Cette présentation des icônes ne vaut que pour l'article mylife™ YpsoPump® suivant: RÉF. 700009421.

Vous trouverez le numéro de référence de votre mylife™ YpsoPump® sur l'appareil lui-même et sur l'étiquette de votre Starter Kit.

**Clause de non-responsabilité:** La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Ypsomed est soumise à licence. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.