

**mylife™ App**

## Paramètres du calculateur de bolus

Demandez à votre professionnel de santé vos données de traitement. Saisissez vos données dans la liste suivante et transférez-les dans vos paramètres de calculateur de bolus de votre application mylife™ App.

**Paramètres du calculateur de bolus****Glycémie minimale pour le calcul**

Si votre valeur de glycémie est inférieure à la valeur minimale saisie, le calculateur de bolus n'effectue pas de calcul et vous informe de consommer des glucides à action rapide.

Plage: 2.8–4.4 mmol/L (par incrément de 0.1 mmol/L) \_\_\_\_\_ mmol/L

**Suggestion de bolus maximal**

Si le bolus calculé est supérieur à la valeur maximale définie, le calculateur de bolus fournit l'information adéquate.

Plage: 0.5–30.0 U (par incrément de 0.5 U) \_\_\_\_\_ U

**Valeur glycémique cible**

Le calculateur de bolus calculera la correction de votre valeur de glycémie pour vous permettre d'atteindre votre valeur cible.

Saisissez d'abord le segment qui débute à minuit. Ensuite, complétez le segment suivant en saisissant l'heure et la valeur glycémique cible, jusqu'à 8 intervalles de temps différents.

Plage: 3.9–11.1 mmol/L (par incrément de 0.1 mmol/L)

Segment 1: Heure de début: 00:00      Heure de fin: \_\_\_\_\_ mmol/L

Segment 2: Heure de début: \_\_\_\_\_      Heure de fin: \_\_\_\_\_ mmol/L

Segment 3: Heure de début: \_\_\_\_\_      Heure de fin: \_\_\_\_\_ mmol/L

Segment 4: Heure de début: \_\_\_\_\_      Heure de fin: \_\_\_\_\_ mmol/L

Segment 5: Heure de début: \_\_\_\_\_      Heure de fin: \_\_\_\_\_ mmol/L

Segment 6: Heure de début: \_\_\_\_\_      Heure de fin: \_\_\_\_\_ mmol/L

Segment 7: Heure de début: \_\_\_\_\_      Heure de fin: \_\_\_\_\_ mmol/L

Segment 8: Heure de début: \_\_\_\_\_      Heure de fin: \_\_\_\_\_ mmol/L



Obtenez les instructions de configuration, étape par étape, de votre calculateur de bolus à l'adresse [www.mylife-diabetescare.ch/configuration-calculateur-de-bolus](http://www.mylife-diabetescare.ch/configuration-calculateur-de-bolus)



**Facteur de correction** Ce facteur indique de quelle quantité votre valeur de glycémie diminue par administration de 1 unité d'insuline.

Saisissez d'abord le segment qui débute à minuit. Ensuite, complétez le segment suivant en saisissant l'heure et le facteur de correction, jusqu'à 8 intervalles de temps différents.

Plage: 0.1–22.2 mmol/L/U (par incrément de 0.1 mmol/L/U)

|            |                       |                     |                |
|------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| Segment 1: | Heure de début: 00:00 | Heure de fin: _____ | _____ mmol/L/U |
| Segment 2: | Heure de début: _____ | Heure de fin: _____ | _____ mmol/L/U |
| Segment 3: | Heure de début: _____ | Heure de fin: _____ | _____ mmol/L/U |
| Segment 4: | Heure de début: _____ | Heure de fin: _____ | _____ mmol/L/U |
| Segment 5: | Heure de début: _____ | Heure de fin: _____ | _____ mmol/L/U |
| Segment 6: | Heure de début: _____ | Heure de fin: _____ | _____ mmol/L/U |
| Segment 7: | Heure de début: _____ | Heure de fin: _____ | _____ mmol/L/U |
| Segment 8: | Heure de début: _____ | Heure de fin: _____ | _____ mmol/L/U |

**Rapport insuline-glucides (I/G)**

Ce facteur indique le nombre de grammes de glucides couverts par 1 unité d'insuline.

Saisissez d'abord le segment qui débute à minuit. Ensuite, complétez le segment suivant en saisissant l'heure et le nombre de grammes de glucides couverts par 1 unité d'insuline, jusqu'à 8 intervalles de temps différents.

Plage: 1–150 g glucides/U (par incrément de 1 g)

|            |                       |                     |                    |
|------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Segment 1: | Heure de début: 00:00 | Heure de fin: _____ | _____ g glucides/U |
| Segment 2: | Heure de début: _____ | Heure de fin: _____ | _____ g glucides/U |
| Segment 3: | Heure de début: _____ | Heure de fin: _____ | _____ g glucides/U |
| Segment 4: | Heure de début: _____ | Heure de fin: _____ | _____ g glucides/U |
| Segment 5: | Heure de début: _____ | Heure de fin: _____ | _____ g glucides/U |
| Segment 6: | Heure de début: _____ | Heure de fin: _____ | _____ g glucides/U |
| Segment 7: | Heure de début: _____ | Heure de fin: _____ | _____ g glucides/U |
| Segment 8: | Heure de début: _____ | Heure de fin: _____ | _____ g glucides/U |

**Utilisation d'insuline active**

Ce paramètre détermine l'utilisation de l'insuline active lors du calcul des suggestions de bolus. Deux méthodes sont disponibles à cet effet.

- ☐ Insuline active soustraite du bolus de correction et du bolus repas  
(Bolus de correction + Bolus repas – Insuline active = Bolus suggéré)
- ☐ Insuline active soustraite uniquement du bolus de correction  
[(Insuline de correction – Ajustement d'insuline active) + Bolus repas = Bolus suggéré]

**Durée d'action de l'insuline**

C'est le temps pendant lequel l'insuline de bolus reste active dans votre corps (et réduira donc la glycémie).

Plage: 2–8 h (par incrément de 0.5 h) \_\_\_\_\_ h