



App mylife CamAPS FX

Strumento di supporto all'istruzione in-app

L'istruzione sull'app mylife CamAPS FX deve essere completata prima che l'utente inizi ad utilizzare l'app con il microinfusore mylife YpsoPump vero e proprio. L'istruzione in-app sostituisce la piattaforma d'istruzione online messa precedentemente a disposizione da CamDiab. L'istruzione in-app è concepita per essere eseguita dagli utenti a casa, prima di iniziare ad usare ufficialmente il microinfusore e l'app mylife CamAPS FX con il team diabetologico. Lo scopo è che l'utente comprenda la procedura di configurazione, l'uso dell'app e acquisisca informazioni aggiuntive sulle diverse funzionalità dell'app mylife CamAPS FX. L'istruzione si compone di diversi moduli. Per ciascun modulo l'utente deve guardare delle animazioni e svolgere compiti pratici (ad es. somministrare un bolo insulinico in modalità virtuale) per mettere in pratica le conoscenze acquisite. L'utente deve terminare con successo tutti i moduli essenziali per completare l'istruzione, dopo di che sarà in grado di associare un microinfusore reale all'app.

Importante: l'avvio del microinfusore e dell'app con il team diabetologico può avvenire esclusivamente una volta concluso l'istruzione. Il team diabetologico può seguire l'istruzione in-app con l'utente nel caso sia necessario un supporto ulteriore.

Procedura d'istruzione



Scaricare l'app mylife CamAPS FX

L'utente deve scaricare l'app mylife CamAPS FX su Google Play Store prima di avviare il microinfusore e l'app mylife CamAPS FX.



App mylife CamAPS FX mmol/L

N.B. per il download e la registrazione occorre una connessione internet. L'istruzione in-app può svolgersi anche senza connessione internet. Se l'utente riceve il messaggio d'errore "materiale d'istruzione non scaricato" deve collegarsi a internet e cercare nuovamente di accedere.

Creare un nuovo account


I nuovi utenti di mylife CamAPS FX devono creare un account per accedere all'app. Utilizzare un indirizzo e-mail a cui poter avere facilmente accesso. Per e-mail saranno inviati i codici di autenticazione a più fattori (MFA) da utilizzare per creare un account, reinstallare l'app o eseguire il logout e il login. Gli utenti esistenti che hanno già eseguito l'istruzione online e inserito il relativo codice nell'app mylife CamAPS FX, non hanno bisogno di eseguire l'istruzione in-app. L'app riconosce automaticamente gli utenti già formati. Le informazioni ricevute durante l'istruzione in-app possono essere consultate nel menu "Aiuto" dell'app, qualora l'utente desideri rivederle.

Selezionare “Istruzione in-app”

Quando si configura l'app, selezionare “Istruzione in-app” per iniziare l'istruzione. Comparirà un pop-up per informare l'utente della necessità di eseguire l'istruzione in-app. Quando si imposta l'app mylife CamAPS FX con dispositivi virtuali o come Companion non è necessario eseguire l'istruzione in-app.

Completare i moduli essenziali d'istruzione in-app

Per eseguire correttamente l'istruzione in-app occorre completare tutti i 3 moduli essenziali (avvio dell'app, funzionalità della schermata iniziale e del menu principale). Altre animazioni sono disponibili nella panoramica dei moduli seguente. Gli altri moduli possono essere esaminati nella sezione “Aiuto” del menu principale dell'app mylife CamAPS FX.

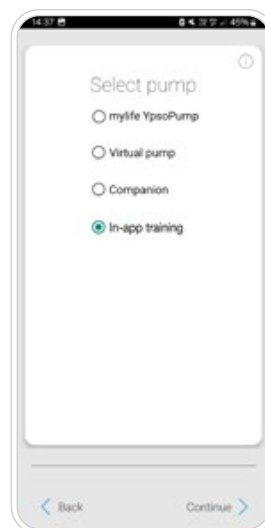

Valutazione dell'istruzione in-app


Al termine l'utente può valutare l'istruzione eseguita. Il punteggio va da 1 stella (molto scarso) a 5 stelle (ottimo). Se lo si desidera, si possono anche scaricare le schede contenenti tutta la formazione ricevuta nell'istruzione in-app. Le schede vengono salvate nella cartella download del telefono.

Avvio dell'associazione del mylife YpsoPump in presenza del team diabetologico

L'utente ha due opzioni:

- Premere “Indietro” per restare nella modalità virtuale.
- Premere “Avanti” per associare il mylife YpsoPump con il sensore.

Dopo aver premuto “Avanti” inizia il processo di associazione del microinfusore e l'app mylife CamAPS FX guida l'utente nella procedura di configurazione.

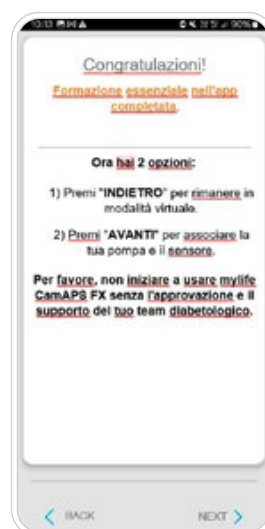

Il mylife YpsoPump e il sensore vengono associati con l'aiuto e l'approvazione del team diabetologico. Quando si attiva il microinfusore assieme al team diabetologico è importante rivedere il suggeritore di bolo, il target glicemico personale e le impostazioni degli avvisi. Non dimenticare di collegare l'app a mylife Cloud o Glooko® e di invitare i Companion, se opportuno, nel menu “Condividi”.

Panoramica dei moduli

Moduli essenziali:

Questi moduli devono essere completati prima di associare un mylife YpsoPump.

Avvio dell'app

- Associazione del microinfusore e del sensore
- Inserimento del peso corporeo
- Inserimento della dose totale giornaliera
- Configurazione del suggeritore di bolo

Funzioni principali

- Navigazione nell'app
- Utilizzo di Auto mode
- Somministrazione di un bolo pasto
- Programmazione della funzione "Ease-off"
- Programmazione della funzione "Boost"
- Somministrazione di una correzione manuale

Menu principale

- Introduzione di Aggiungi pasto
- Impostazione di Avvisi
- Impostazione di un Target glicemico personale
- Condivisione dei dati sul diabete

Informazioni supplementari:

- Aggiornamento delle dimensioni dei pasti preimpostate
- Calibrazione di un sensore
- Funzione CamAPS Companion
- Modifica delle unità di carboidrati
- Come funziona l'autoapprendimento di mylife CamAPS FX?
- Come controlla l'erogazione di insulina?
- Gestione della gravidanza
- Erogazione pulsata anti-occlusione
- Suggerimenti tecnici importanti
- Utilizzo della funzione Aggiungi pasto
- Utilizzo della funzione Blocco

Consigli pratici per la gestione dell'istruzione in-app

- Per visualizzare i sottotitoli delle animazioni, l'utente può ruotare lo smartphone e utilizzare la visione in orizzontale.
- Per eseguire i compiti dei moduli di istruzione "Impostazione del suggeritore di bolo" e "Avvisi", occorre salvare tutte le impostazioni e gli avvisi. L'utente può utilizzare le impostazioni concordate in precedenza con il team diabetologico, oppure può confermare i valori predefiniti dell'app e servirsene.
- Una volta terminato l'istruzione in-app, l'utente può scaricare le schede che riassumono il contenuto delle animazioni. Le schede saranno salvate nella sezione "Download" del telefono dell'utente. Per aprire le schede occorre un visualizzatore PDF.
- Le animazioni dell'istruzione in-app possono essere riviste nella sezione "Aiuto" dell'app mylife CamAPS FX.
- Quando si esegue la connessione al mylife YpsoPump occorre reinserire la dose totale giornaliera (Total Daily Dose – TDD) e il peso corporeo. Gli "Avvisi" e le "Impostazioni del suggeritore di bolo" inseriti nel corso dell'istruzione in-app saranno salvati nell'app dopo aver associato il microinfusore. Impostare un nuovo Target glicemico personale se non si desidera utilizzare il valore preimpostato di 5.8 mmol/L. Il Target glicemico personale può essere impostato nei menu "Impostazioni" e "Target glicemico personale" dell'app. Controllare tutte le impostazioni con il team diabetologico.
- È possibile impostare la condivisione dei dati con mylife Cloud o Glooko al completamento dell'istruzione.
- Gli utenti esistenti di mylife CamAPS FX, i companion e le persone che utilizzano l'app in modalità virtuale possono accedere alle animazioni e alle schede dell'istruzione in-app nel menu "Aiuto" della loro app.

Esclusione di responsabilità: Le immagini dei prodotti hanno esclusivamente scopo illustrativo. // mylife e YpsoPump sono marchi registrati di Ypsomed AG in numerosi paesi. // CamAPS è un marchio registrato di CamDiab Ltd. // Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., e il loro uso da parte di Ypsomed è concesso in licenza. // Altri nomi e marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari. // mylife CamAPS FX su iOS: la novità descritta è disponibile in paesi selezionati e prossimamente in altri paesi. Tale estensione è subordinata all'approvazione normativa locale.

❏ Per informazioni sulla sicurezza dei prodotti descritti, consultare il manuale d'uso o www.mylife-diabetescare.ch/sicurezza