



Préparatifs indispensables à l'attention des futurs utilisateurs de l'application mylife CamAPS FX, à effectuer AVANT le démarrage et l'instruction.

Nom de l'utilisateur: _____

Date de démarrage de mylife Loop: _____

Assurez-vous d'avoir une ordonnance pour les cartouches d'insuline PumpCart.
Apportez une ampoule d'insuline le jour de l'instruction.

Vérifiez que votre smartphone Android et votre système d'exploitation soient compatibles avec l'application mylife CamAPS FX:

- Dexcom G6: <https://www.dexcom.com/fr-CH/compatibility/g6>
- FreeStyle Libre 3 / Libre 3 Plus: <https://www.diabetescare.abbott/support/manuals.html>
(Mobile Device & OS Compatibility list [Appareil mobile & compatibilité OS])



Compatibilité
Dexcom G6



Compatibilité
FreeStyle Libre 3 / Libre 3 Plus

Vérifier également les points suivants:

- Version du système d'exploitation (OS)
- Désactivez la mise à jour automatique du système d'exploitation.
- Blocage des mises à jour automatiques de mylife CamAPS FX dans le Google Play Store afin de choisir l'heure à laquelle la mise à jour doit être déclenchée.
- Téléphone protégé par verrouillage de l'écran
- En cas d'utilisation d'un capteur FreeStyle Libre 3 / FreeStyle Libre 3 Plus, assurez-vous que le dispositif Android connecté dispose de la technologie NFC (near field communication [communication en champ proche]).

Appli mylife CamAPS FX



mmol/L

Veuillez télécharger l'application mylife CamAPS FX. Une connexion Internet est requise pendant le processus de téléchargement et l'enregistrement. En soi, la formation intégrée à l'application peut être suivie sans connexion Internet

Créer un compte et suivre la formation intégrée à l'application. Utilisez une adresse e-mail à laquelle vous pouvez facilement accéder. La formation intégrée à l'application durera environ 60 minutes. Il vous sera demandé de regarder plusieurs petites vidéos et de réaliser certains exercices pratiques par le biais d'une liaison avec une pompe et un capteur virtuels. Dans le cadre de la formation intégrée à l'application, il vous sera demandé de saisir vos réglages personnels dans l'application. Si vous ne les avez pas encore sous la main, confirmez les paramètres prédéfinis.

Après avoir terminé la formation intégrée à l'application, veuillez **ne pas** procéder à l'appairage avec votre pompe mylife YpsoPump ou système de CGM, et ne pas démarrer l'Auto mode, à moins que vous n'ayez obtenu l'autorisation de votre équipe de soins du diabète.





Choisir l'option "Formation intégrée à l'application" (In-app training)

Lors de la configuration de l'application, l'option "Formation intégrée à l'application" doit être sélectionnée pour démarrer la formation en question. Une fenêtre contextuelle apparaîtra pour informer l'utilisateur que la formation intégrée à l'application doit être effectuée. Lors de la configuration de l'application mylife CamAPS FX avec des dispositifs virtuels ou en tant que Companion, il n'est pas nécessaire d'effectuer la formation intégrée à l'application.


Terminer les modules essentiels de la formation intégrée à l'application

Pour terminer la formation intégrée à l'application avec succès, il faut avoir suivi les 3 modules essentiels (démarrage de l'application, fonctionnalités de l'écran d'accueil (Principales fonctionnalités) et fonctionnalités du menu principal). Des vidéos supplémentaires sont disponibles dans l'aperçu des modules suivants. Ces modules supplémentaires (Informations supplémentaires) peuvent être consultés dans la section "Aide" du menu principal de l'application mylife CamAPS FX.

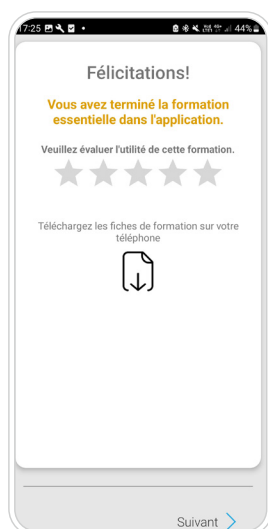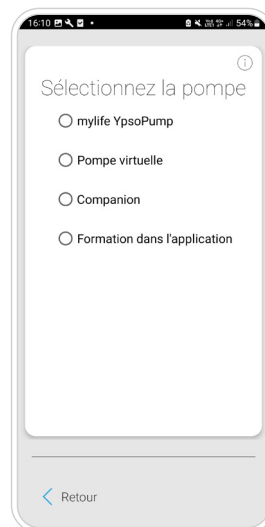

Évaluer la formation intégrée à l'application

À la fin de la formation, l'utilisateur peut évaluer son expérience de la formation. Il est possible d'attribuer 1 étoile (pour très mauvaise) à 5 étoiles (pour très bonne). Il est également possible de télécharger des fiches de formation avec toutes les informations contenues dans la formation intégrée à l'application. Les fiches seront enregistrées dans le dossier de téléchargement du téléphone de l'utilisateur.

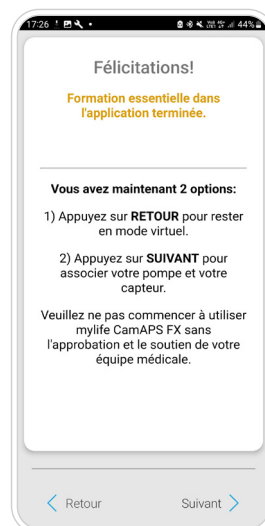

Commencer à appairer la pompe mylife YpsoPump avec l'équipe soignante

À présent, l'utilisateur a deux options:

- Appuyer sur "Retour" pour rester en mode virtuel. Cette option est sélectionnée lorsque l'utilisateur n'a pas encore reçu de formation technique sur la pompe.
- Appuyer sur "Suivant" pour appairer la pompe mylife YpsoPump et le capteur.

Après avoir sélectionné "Suivant", la procédure d'appairage de la pompe démarre et l'application mylife CamAPS FX guide l'utilisateur tout au long du processus de configuration.

La pompe mylife YpsoPump et le capteur doivent être appairés avec l'aide et l'autorisation de l'équipe soignante. Lors du démarrage de mylife CamAPS FX avec l'équipe soignante, il est important de passer en revue le calculateur de bolus, la cible personnalisée de glucose et les paramètres d'alertes. Ne pas oublier d'appairer l'application avec mylife Cloud ou Glooko® et d'inviter des Companions, le cas échéant, via le menu "Partager".

mylife Cloud/Glooko®

- Pour partager les données avec l'établissement clinique, créez un compte mylife Cloud et/ou Glooko®.
- Nom d'utilisateur: _____



mylife Cloud
<https://mylife-cloud.net>



Glooko®
<https://join.glooko.com>

Capteurs de glucose

Veuillez apporter le matériel suivant pour la formation:

- Pour Dexcom G6: numéro de série du transmetteur et nouveau capteur
- Pour FreeStyle Libre 3 / FreeStyle Libre 3 Plus: nouveau capteur

Conseils et astuces pour gérer la formation intégrée à l'application

- Pour afficher les sous-titres des animations, l'utilisateur peut basculer l'écran de son smartphone en mode paysage.
- Pour finir les tâches des modules de formation "Configuration du calculateur de bolus" et "Alertes", tous les paramètres et toutes les alertes doivent être enregistrées. L'utilisateur peut utiliser les paramètres déjà validés avec l'équipe soignante, ou il peut confirmer et utiliser les valeurs par défaut de l'application.
- Une fois la formation intégrée à l'application terminée, l'utilisateur peut télécharger les fiches résumant le contenu des animations. Les fiches seront enregistrées dans la section "Téléchargement" (Download) du téléphone de l'utilisateur. Pour ouvrir les fiches, l'application PDF viewer est requise.
- Les vidéos de la formation intégrée à l'application peuvent être consultées dans la section "Aide" de l'application mylife CamAPS FX.
- La dose totale quotidienne (DTQ) et le poids corporel doivent être à nouveau saisis lors de la connexion à la pompe mylife YpsoPump. Les paramètres des alertes et du calculateur de bolus saisis dans le cadre de la formation intégrée à l'application seront enregistrés dans l'application une fois la pompe appairée. Une nouvelle cible personnalisée de glucose peut être définie si le réglage par défaut de 5.8 mmol/L ne s'applique pas. La cible personnalisée de glucose peut être réglée dans les menus "Paramètres" et "Cible personnalisée de glucose" de l'application. Tous les réglages doivent être examinés conjointement avec l'équipe soignante.
- Le partage de données avec mylife Cloud ou Glooko peut être configuré une fois la formation achevée.
- Les utilisateurs de mylife CamAPS FX, les companions et les personnes qui utilisent l'application en mode virtuel peuvent accéder aux vidéos de la formation intégrée à l'application et aux fiches via le menu "Aide" de leur application.

Clause de non-responsabilité: les images de produits sont exclusivement proposées à fins d'illustration. // mylife et YpsoPump sont des marques déposées d'Ypsomed AG dans plusieurs pays. // CamAPS est une marque déposée de CamDiab Ltd. // Dexcom et Dexcom G6 sont des marques déposées de Dexcom, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. // Le boîtier du capteur, FreeStyle, Libre et les marques apparentées sont des marques commerciales d'Abbott. // La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Ypsomed est soumise à licence. // Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. // mylife Loop avec FreeStyle Libre 3 / Libre 3 Plus: L'innovation décrite est disponible dans certains pays et sera bientôt étendue à d'autres pays. L'expansion dépend de l'approbation réglementaire locale.

Pour obtenir des informations concernant la sécurité des produits mentionnés, consultez le mode d'emploi ou le site www.mylife-diabetescare.ch/securite