



YpsoPump®

Panoramica delle icone



Leggere il manuale d'uso

**Per ulteriori informazioni, visitate il sito
www.mylife-diabetescare.com**

Ypsomed Italia S.r.l. // Via Santa Croce, 7 //
IT-21100 Varese (VA) // +39 0332 189 0607

Ypsomed AG // Mercato svizzero // Weissensteinstrasse 26 //
CH-4503 Soletta // Numero verde: 0800 44 11 44



Ypsomed AG
CH-3401 Burgdorf
Switzerland
www.ypsomed.com



YPSOMED
SELF CARE SOLUTIONS

Comandi di navigazione



Annulla



Avanti



Conferma



Indietro di un livello del menu



Avanti per sbloccare



Indietro di una posizione

Icone di avviso



Livello cartuccia basso



Bolo annullato



Batteria quasi scarica



Funzione basale temporanea completata o annullata



Ritorno del pistone non completato



Arresto microinfusore



Priming non completato



Connessione Bluetooth® fallita

Icone generali



Avviso



Livello di carica batteria



Priming del catetere in corso



Pairing del Bluetooth® in corso



Allarme



Batteria rimossa



Priming della cannula in corso



Premi pulsante attivatore per 2 secondi



Segnale acustico



Rimuovi batteria



Scollega il set di infusione dal corpo



Quantità di insulina totale giornaliera (basale e bolo)



Segnale di vibrazione



Ritorno pistone in corso



Pronto per il pairing del Bluetooth®

Icone nel menu principale e nei sottomenu

	Bolo		Funzione basale temporanea attivata/annulla		Modalità Stop/passa in modalità Run		Bluetooth® attivato/disattiva
	Bolo normale		Sostituzione cartuccia e livello cartuccia corrente		Impostazioni		Bluetooth® disattivato/attiva
	Bolo prolungato		Ritorno del pistone		Ora del giorno		Pairing del Bluetooth®
	Bolo combinato		Priming del set di infusione		Data		
	Basali		Priming del catetere		Imposta incremento bolo		
	Profilo basale A		Priming della cannula		Blind bolus attivato/disattiva		
	Profilo basale B		Dati		Blind bolus disattivato/attiva		
	Passa al profilo basale A		Dati terapia		Blocco di accesso attivato/disattiva		
	Passa al profilo basale B		Storico allarmi		Blocco di accesso disattivato/attiva		
	Funzione basale temporanea		Modalità Run/passa in modalità Stop		Ruota display		

Icone di allarme

	Manca batteria		Manca insulina
	Batteria scarica		Cartuccia vuota
	Batteria non idonea		Stop automatico
	Carica batteria interna ricaricabile		Errore elettronico
	Occlusione		



Questa panoramica delle icone è valida esclusivamente per il microinfusore mylife™ YpsoPump® con il seguente numero di articolo: REF 700009431 (IT), REF 700009422 (CH).
Il numero di articolo del microinfusore mylife™ YpsoPump® è riportato sul dispositivo stesso e sull'etichetta dello Starter Kit.

Esclusione di responsabilità: Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., e il loro uso da parte di Ypsomed è concesso in licenza. Altri nomi e marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.