




mylife YpsoPump Avertissements et alarmes


Avertissements affichés



Niveau de cartouche faible

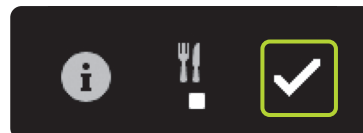


Bolus annulé

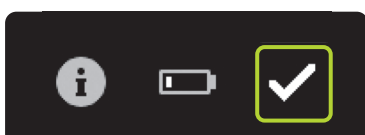


Niveau de charge de la pile faible



Fonction de débit basal temporaire interrompue

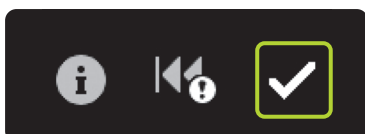

Retour incomplet du piston

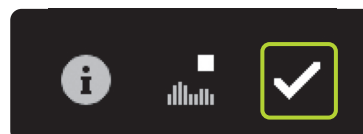

Pompe en mode suspension



Amorçage inachevé



Échec de la connexion Bluetooth®



- Insuline toujours distribuée.
- Apparaissent sur l'écran d'état et doivent être confirmés.
- Les avertissements affichés sont essentiellement des signaux de vibration et sonores et présentent 4 niveaux de progression.
- Les niveaux progressent à intervalles de 30 minutes.

Progression des niveaux d'avertissement:

Niveau 1: Vibrations

Niveau 2: Vibrations et signaux sonores de faible intensité

Niveau 3: Vibrations et signaux sonores de forte intensité


Niveau 4: Vibrations et signaux sonores de plus forte intensité



Alarmes



Pas de pile

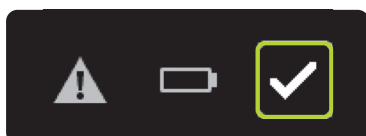

Pile déchargée



Pile inadaptée



Pas d'insuline



Cartouche vide



Occlusion



Charger la batterie interne rechargeable



Auto-Stop



Erreur électronique

Étape 1: Déconnectez le dispositif de perfusion de votre corps et retirez la pile alcaline de son compartiment.



Erreur électronique

Étape 2: Appuyez sur le bouton de commande pendant 2 secondes. Pour remettre la pompe en service, effectuez les étapes décrites à la page 37 du guide de l'utilisateur et vérifiez vos paramètres de traitement. Remplacez la cartouche et le dispositif de perfusion selon les étapes décrites à la page 95.



Plus de distribution d'insuline.

- Les alarmes apparaissent sur l'écran d'état et doivent être confirmées et traitées.
- Les avertissements affichés sont essentiellement des signaux de vibration et sonores et présentent 4 niveaux de progression.
- Les niveaux progressent à intervalles de 5 minutes.

Progression des niveaux d'avertissement:

Niveau 1: Vibrations

Niveau 2: Vibrations et signaux sonores de faible intensité

Niveau 3: Vibrations et signaux sonores de forte intensité

Niveau 4: Vibrations et signaux sonores de plus forte intensité

Clause de non-responsabilité: mylife et mylife YpsoPump sont des marques déposées de Ypsomed AG. // La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Ypsomed est soumise à licence. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. // Le contenu est proposé à titre purement informatif et ne saurait se substituer à un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Demandez toujours l'avis de votre médecin ou de tout autre professionnel de santé qualifié.