

YpsoPump

Icon-Übersicht



Lesen Sie das Benutzerhandbuch

Weitere Kontaktdaten finden Sie unter
www.mylife-diabetescare.com



DiabetesCare

700100174/11005891-de/V02

Icons allgemein



Warnhinweis



Alarm



Akustisches Signal



Vibrationssignal



Batterieladung



Batterie entfernt



Batterie entfernen



Gewindestange fährt zurück

Navigationshilfen



Abbrechen



Bestätigen



Vorwärts zum Entsperren



Schloss



Vorwärts



Eine Menü-Ebene nach oben



Einen Schritt zurück



Schlauch wird gefüllt



Kanüle wird gefüllt



Infusionsset vom Körper abkoppeln



Bereit zur Bluetooth®-Kopplung



Bluetooth®-Kopplung läuft



Funktionstaste für 2 Sekunden drücken



Totale Insulinmenge pro Tag (Basal und Bolus)

Icons Warnhinweise



Patronen-/Reservoirfüllstand niedrig



Batterieladung niedrig



Zurückfahren der Gewindestange nicht abgeschlossen



Füllvorgang nicht abgeschlossen



Bolus abgebrochen



Temporäre Basalratenfunktion abgebrochen



Insulinpumpe gestoppt



Bluetooth®-Verbindung fehlgeschlagen

Icons Hauptmenü und Untermenüs

	Bolus		Temporäre Basalratenfunktion aktiviert/abbrechen
	Normaler Bolus		Patronen-/Reservoirwechsel und aktueller Patronen-/Reservoirfüllstand
	Verzögerter Bolus		Gewindestange zurückfahren
	Kombinierter Bolus		Infusionsset füllen
	Basalraten		Schlauch füllen
	Basalratenprofil A		Kanüle füllen
	Basalratenprofil B		Daten
	Zu Basalratenprofil A wechseln		Therapie-Daten
	Zu Basalratenprofil B wechseln		Alarm-Verlauf
	Temporäre Basalratenfunktion		

	Run-Modus/zum Stopp-Modus wechseln		Zugriffssperre aktiv/deaktivieren
	Stopp-Modus/zum Run-Modus wechseln		Zugriffssperre inaktiv/aktivieren
	Einstellungen		Screen drehen
	Uhrzeit		Bluetooth® aktiv/deaktivieren
	Datum		Bluetooth® inaktiv/aktivieren
	Bolusschrittweite einstellen		Bluetooth®-Kopplung
	Bolusgrenze einstellen		
	Basalratengrenze einstellen		
	Blindbolus aktiv/deaktivieren		
	Blindbolus inaktiv/aktivieren		

Icons Alarme

	Keine Batterie		Kein Insulin
	Batterie leer		Patrone/Reservoir leer
	Batterie nicht geeignet		Auto-Stopp
	Internen Akku laden		Elektronikfehler
	Okklusion		

 Diese Icon-Übersicht gilt nur für die folgenden YpsoPump Artikel: Ref 700009374, 700009384, 700009420. Die Referenznummer Ihrer YpsoPump finden Sie auf Ihrem Gerät und auf dem Etikett Ihrer Verpackung.

Disclaimer: mylife und YpsoPump sind registrierte Handelsmarken von mylife Diabetes Care AG oder ihren Tochtergesellschaften. Die Bluetooth®-Wortmarke und die Bluetooth®-Logos sind registrierte Handelsmarken der Bluetooth SIG, Inc. und jeder Gebrauch dieser Marken durch die mylife Diabetes Care AG oder ihre Tochtergesellschaften ist unter Lizenz.