


CamAPS FX App In-App Schulung

Die In-App Schulung für die CamAPS FX App muss absolviert werden, bevor ein neuer Benutzer die App mit der YpsoPump verwenden kann. Die Schulung ist so konzipiert, dass sie vorab zuhause durchgeführt werden kann, um gut vorbereitet für die technische Einweisung und den Start des myLoop zu sein. Ziel ist es, dass neue Benutzer den Einrichtungsprozess und die Handhabung der CamAPS FX App verstehen und Informationen über die verschiedenen Funktionen der CamAPS FX App erhalten. Die Schulung besteht aus drei Modulen. In jedem Modul müssen Sie Animationen ansehen und praktische Aufgaben lösen (z. B. einen Insulinbolus im virtuellen Modus abgeben), um das erworbene Wissen anzuwenden. Sie müssen alle erforderlichen Module absolvieren und alle Aufgaben bearbeiten, um die Schulung abzuschließen. Die In-App Schulung dauert ca. 1 Stunde, es kann beliebig oft unterbrochen werden.

ⓘ Wichtig: Für die In-App Schulung benötigen neue Benutzer von ihrem Diabetes-Team die persönlichen Einstellungen für die App (s. Datenblatt zur technischen Einweisung). Die Kopplung einer echten YpsoPump mit der App erfolgt erst nach/mit der technischen Einweisung in die Pumpe.

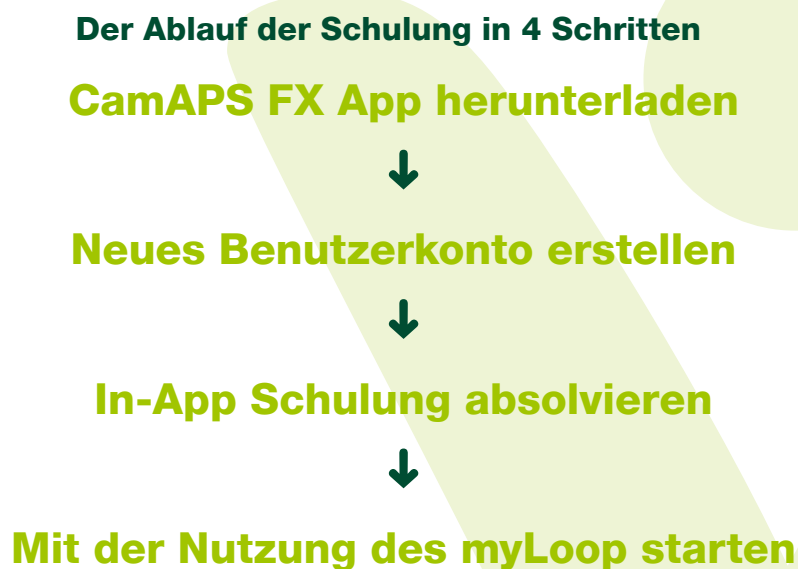

Die CamAPS FX App herunterladen

Laden Sie die CamAPS FX App in der gewünschten Maßeinheit (mg/dL oder mmol/L) auf Ihr kompatibles Smartphone herunter.



CamAPS FX App mg/dL



CamAPS FX App mmol/L



Für das Herunterladen und die Anmeldung in der App ist eine Internetverbindung erforderlich. Die In-App Schulung selbst kann ohne Internetverbindung durchgeführt werden. Sollten Sie die Fehlermeldung "Schulungsmaterial nicht heruntergeladen" erhalten, stellen Sie bitte eine Verbindung mit dem Internet her und versuchen Sie erneut, auf die Schulung zuzugreifen.

Neues Benutzerkonto erstellen

Neue CamAPS FX Benutzer müssen ein Konto erstellen, um sich in der App anzumelden. Bitte verwenden Sie eine E-Mail-Adresse, auf die Sie leicht zugreifen können. Sie erhalten per E-Mail einen Code für die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), wenn Sie ein Konto erstellen oder bei einer Neuinstallation der App oder wenn sie sich erneut in der App anmelden. Die Informationen zur In-App-Schulung sind im "Hilfe"-Menü der App abrufbar, falls Sie sie noch einmal nachlesen möchten.

"In-App Schulung" auswählen

Wählen Sie im nächsten Schritt die Option "In-App Schulung" aus, um mit der Schulung zu beginnen. Es erscheint ein Pop-up-Fenster, das darauf hinweist, dass die In-App Schulung durchgeführt werden muss. Wenn Sie die CamAPS FX App mit virtuellen Geräten oder als Companion einrichten, ist es nicht notwendig, die In-App Schulung zu absolvieren.



Die erforderlichen In-App Schulungsmodule absolvieren

Um die In-App Schulung erfolgreich abzuschließen, müssen alle drei erforderlichen Module (Starten der App, Funktionen des Startbildschirms (die wesentlichen Merkmale) und Funktionen des Hauptmenüs) durchlaufen werden. Weitere Animationen finden Sie in der darauffolgenden Modulübersicht. Die zusätzlichen Module können im Abschnitt "Hilfe" des Hauptmenüs der CamAPS FX-App eingesehen werden.

Die In-App Schulung bewerten

Bitte bewerten Sie die Schulung, nachdem Sie sie abgeschlossen haben. Möglich ist eine Bewertung mit 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut) Sternen. Wenn Sie möchten, können Sie auch Infoblätter mit allen in der In-App Schulung enthaltenen Informationen herunterladen. Die Infoblätter werden im Download-Ordner Ihres Smartphones gespeichert.




Die Kopplung mit der YpsoPump nach der technischen Einweisung zur Pumpe oder zusammen mit Ihrem Diabetes-Team starten

Sie haben nun zwei Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf "Zurück", um im virtuellen Modus zu bleiben. Wählen Sie diese Option, wenn Sie noch keine technische Einweisung in die Pumpe hatten.
- Tippen Sie auf "Weiter", um die YpsoPump und den Sensor zu koppeln und die Einrichtung der CamAPS FX App fortzusetzen.

i Die YpsoPump und der Sensor dürfen nur mit Zustimmung des Diabetes-Teams gekoppelt werden. Bei der Inbetriebnahme der CamAPS FX App ist es wichtig, die Einstellungen für den Boluskalkulator, für den persönlichen Glukosezielwert und für die Alarme zu überprüfen.

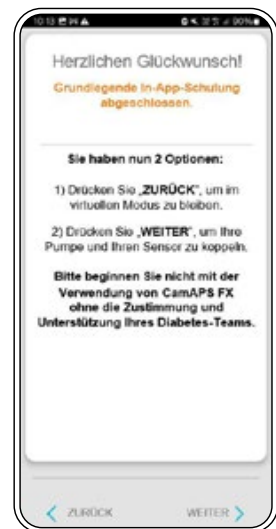

Tipps und Hinweise zur In-App Schulung

- Um die Untertitel der Animationen anzuzeigen, drehen Sie das Smartphone ins Querformat.
- Um die Aufgaben für die Trainingsmodule "Einrichten des Boluskalkulators" und "Alarme" zu lösen, müssen alle Einstellungen und Alarme gespeichert werden. Sie können entweder die Einstellungen verwenden, die zuvor mit dem Diabetes-Team vereinbart wurden, oder die Standardwerte der App bestätigen.
- Nach Abschluss der In-App Schulung können Sie Infoblätter herunterladen, die den Inhalt der Animationen zusammenfassen. Die Infoblätter werden im Bereich "Download" Ihres Smartphones gespeichert; zum Öffnen der Infoblätter ist ein PDF-Viewer erforderlich.
- Die Animationen der In-App Schulung können im Abschnitt "Hilfe" der CamAPS FX App eingesehen werden.
- Bei der Inbetriebnahme der CamAPS FX App beachten Sie bitte: Die Insulin-Tagesgesamtdosis (TDD) und das Körpergewicht müssen bei der Kopplung mit der YpsoPump erneut eingegeben werden. Die im Rahmen der In-App Schulung eingegebenen "Alarme" und "Einstellungen des Boluskalkulators" werden in der App gespeichert, nachdem die Pumpe gekoppelt wurde. Bitte legen Sie in Abstimmung mit Ihrem Diabetesteam einen neuen persönlichen Glukosezielwert fest, wenn Sie nicht die Standardeinstellung (104 mg/dL oder 5,8 mmol/L) verwenden möchten. Alle Einstellungen sollten im Rahmen der technischen Einweisung bzw. zusammen mit Ihrem Diabetes-Team überprüft werden.
- Für die Übertragung von Daten an Glooko® richten Sie dort ein Benutzerkonto ein.
- Bestehende CamAPS FX Benutzer, Companions und Personen, die die App nur im virtuellen Modus verwenden, können auf die Animationen und Infoblätter der In-App Schulung über das Menü "Hilfe" ihrer App zugreifen.

Disclaimer: Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung. // mylife, myLoop und YpsoPump sind registrierte Handelsmarken von mylife Diabetes Care AG oder ihren Tochtergesellschaften. // CamAPS ist eine eingetragene Marke von CamDiab Ltd. // Andere Handelsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

 Sicherheitsinformationen zu den genannten Produkten finden Sie in der Gebrauchsanweisung oder unter www.mylife-diabetescare.de/sicherheit, www.mylife-diabetescare.at/sicherheit oder www.mylife-diabetescare.ch/sicherheit



mylife Diabetes Care GmbH • Höchster Straße 70 • 65835 Liederbach • www.mylife-diabetescare.de
mylife Diabetes Care GmbH • Am Euro Platz 2 • 1120 Wien • www.mylife-diabetescare.at
mylife Diabetes Care AG • Markt Schweiz • Lyssachstrasse 40 • 3400 Burgdorf • www.mylife-diabetescare.ch