


YpsoPump

Warnhinweise und Alarme der YpsoPump


Warnhinweise



Ampullen-/Reservoirfüllstand niedrig

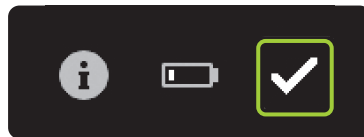


Batterieladung niedrig

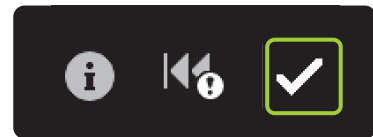


Zurückfahren der Gewindestange nicht abgeschlossen




Füllvorgang nicht abgeschlossen

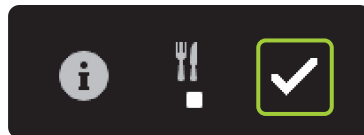

Bolus abgebrochen

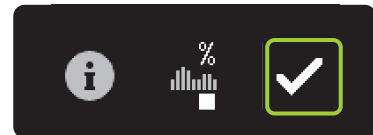

Temporäre Basalratenfunktion abgebrochen

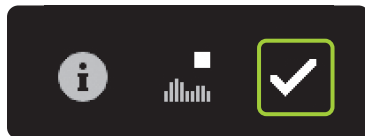

Insulinpumpe gestoppt



Bluetooth®-Verbindung fehlgeschlagen

- i**
- Warnhinweise werden primär taktil und akustisch in 4 Eskalationsstufen signalisiert.
 - Die Stufen eskalieren im Abstand von 30 Minuten.
 - Die Warnhinweise erscheinen auf dem Status-Screen und müssen bestätigt werden. Dabei kann der Screen mit der Funktionstaste eingeschaltet werden.
 - Die Warnhinweise führen zu keinem Abbruch der Insulinabgabe.
 - Nach Bestätigung aller Warnhinweise erscheint wieder der ursprüngliche Status-Screen.
 - Der Warnhinweis besteht aus 1 taktilen Signal, gefolgt von 2 akustischen Signalen.

Eskalationsstufen für Warnhinweise:

Stufe 1: Taktil

Stufe 2: Taktil und schwaches akustisches Signal

Stufe 3: Taktil und mittleres akustisches Signal


Stufe 4: Taktil und starkes akustisches Signal

YpsoPump

Alarme



Keine Batterie

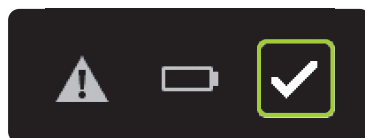

Batterie leer




Batterie nicht geeignet



Kein Insulin



Ampulle/Reservoir leer

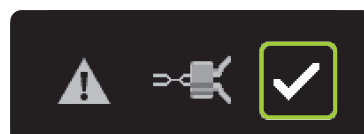

Okklusion



Internen Akku laden



Auto-Stopp



Elektronikfehler

Schritt 1: Koppeln Sie das Infusionsset vom Körper ab und entfernen Sie die Alkaline-Batterie aus dem Batteriefach.



Elektronikfehler

Schritt 2: Drücken Sie die Funktionstaste für 2 Sekunden. Die Insulinpumpe befindet sich jetzt ohne Batterie im Lagerzustand. Nehmen Sie die Insulinpumpe erneut in Betrieb und überprüfen Sie Ihre Therapieeinstellungen. Wechseln Sie die Ampulle/ das Reservoir und das Infusionsset.

i Alle Alarme führen zu einem Abbruch der Insulinabgabe

- Die Alarme werden primär taktil und akustisch in 4 Eskalationsstufen signalisiert.
- Die Stufen eskalieren im Abstand von 5 Minuten. Wird ein Alarm bestätigt, aber nicht behoben, wird er nach 30 Minuten wieder akustisch und taktil signalisiert.
- Ausnahme ist der Elektronikfehler. Dieser wird unmittelbar und dauerhaft akustisch und taktil signalisiert.
- Der Alarm besteht aus 3 taktilen Signalen, gefolgt von 3 akustischen Signalen.

Eskalationsstufen für Alarme:

Stufe 1: Taktil

Stufe 2: Taktil und schwaches akustisches Signal

Stufe 3: Taktil und mittleres akustisches Signal

Stufe 4: Taktil und starkes akustisches Signal

Disclaimer: mylife und YpsoPump sind registrierte Handelsmarken von mylife Diabetes Care AG oder ihren Tochtergesellschaften. // Die Bluetooth®-Wortmarke und die Bluetooth®-Logos sind registrierte Handelsmarken der Bluetooth SIG, Inc. und jeder Gebrauch dieser Marken durch die mylife Diabetes Care AG oder ihre Tochtergesellschaften ist unter Lizenz. Befolgen Sie die Anleitung im Benutzerhandbuch der YpsoPump.



Sicherheitsinformationen zu den genannten Produkten finden Sie in der Gebrauchsanweisung oder unter www.mylife-diabetescare.ch/sicherheit



mylife Diabetes Care AG
Lyssachstrasse 40 • 3400 Burgdorf • Switzerland
www.mylife-diabetescare.com