

YpsoPump

Avertissements et alarmes à la pompe YpsoPump


Avertissements



Niveau de cartouche/réservoir faible



Niveau de charge de la pile faible

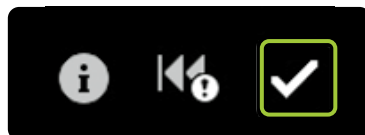


Retour incomplet du piston




Purge inachevée



Bolus annulé

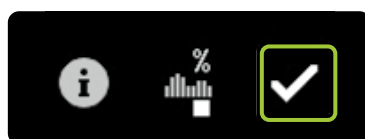

Fonction de débit basal temporaire annulée

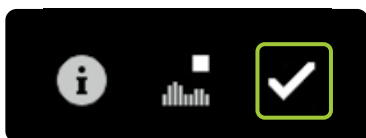

Pompe à insuline en mode suspension



Échec de la connexion Bluetooth®

- i**
- Les avertissements affichés sont essentiellement des signaux de vibration et sonores et présentent 4 niveaux de progression.
 - Les niveaux progressent à intervalles de 30 minutes.
 - Les avertissements apparaissent sur l'écran d'état et doivent être confirmés. À cette fin, l'écran peut être mis sous tension à l'aide du bouton de commande.
 - Les avertissements n'entraînent aucune annulation d'administration d'insuline.
 - Une fois les avertissements confirmés, l'écran d'état original réapparaît.
 - L'avertissement consiste en 1 signal de vibration suivi de 2 signaux sonores.

Progression des niveaux d'avertissement:

Niveau 1: Vibrations

Niveau 2: Vibrations et signaux sonores de faible intensité

Niveau 3: Vibrations et signaux sonores de forte intensité

Niveau 4: Vibrations et signaux sonores de plus forte intensité

YpsoPump

Alarmes



Pas de pile



Pile déchargée



Pile inadaptée



Pas d'insuline




Cartouche/Réservoir vide



Occlusion



Charger la batterie interne rechargeable

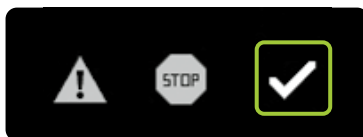

Arrêt automatique



Erreur électronique

Étape 1: Déconnectez le dispositif de perfusion de votre corps et retirez la pile alcaline de son compartiment.



Erreur électronique

Étape 2: Appuyez sur le bouton de commande pendant 2 secondes. La pompe à insuline est désormais sans pile et en veille prolongée. Remettez la pompe en service et vérifiez vos paramètres de traitement. Remplacez la cartouche/le réservoir et le dispositif de perfusion.

i Les alarmes entraînent toutes l'interruption de l'administration de l'insuline

- Les alarmes produites sont essentiellement des signaux de vibration et sonores et présentent 4 niveaux de progression.
- Les niveaux progressent à intervalles de 5 minutes. Si une alarme est confirmée sans être traitée, elle est de nouveau déclenchée sous forme sonore et de vibration après 30 minutes.
- Une erreur électronique constitue l'exception à cette règle. Celle-ci est indiquée directement et en permanence par des signaux sonores et de vibration.
- L'alarme consiste en 3 signaux de vibrations suivis de 3 signaux sonores.

Progression des niveaux d'alarme:

Niveau 1: Vibrations

Niveau 2: Vibrations et signaux sonores de faible intensité

Niveau 3: Vibrations et signaux sonores de forte intensité

Niveau 4: Vibrations et signaux sonores de plus forte intensité

Clause de non-responsabilité: mylife et YpsoPump sont des marques déposées de mylife Diabetes Care AG ou de ses filiales. // La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par mylife Diabetes Care AG ou ses filiales est soumise à licence. Suivez les instructions du guide de l'utilisateur de la pompe YpsoPump.

 Pour obtenir des informations concernant la sécurité des produits mentionnés, consultez le mode d'emploi ou le site www.mylife-diabetescare.ch/securite