

Guide de transition vers le système Dexcom G7

Ce guide explique comment passer au système de mesure continue du glucose (MCG) Dexcom G7.

Avant de changer de système

i Veuillez vous assurer que:

- Vous disposez d'un capteur Dexcom G7
- Vous utilisez la dernière version de l'application CamAPS FX
- Votre smartphone est compatible avec CamAPS FX et avec votre capteur
 - Visitez le site <https://camdiab.com/fr-ch/faq> pour des recommandations en matière de compatibilité

Quelles sont les nouveautés avec Dexcom G7?

- Capteur et émetteur tout-en-un
- Temps de préchauffage réduit (environ 30 minutes)
- Période de grâce de 12 heures qui permet de remplacer le capteur au moment approprié pour vous


Bon à savoir

- Vous pouvez passer de l'application G7 à l'application CamAPS FX sans avoir à remplacer votre capteur G7
- Vous pouvez passer d'un capteur compatible à un autre à tout moment, mais un seul MCG à la fois peut être connecté
- Gardez votre téléphone à proximité de votre capteur au moment de l'appairage
- Si l'appairage échoue, désactivez et réactivez le Bluetooth, puis réessayez

Besoin d'aide? Si vous rencontrez un problème quelconque:

- Consultez l'assistance intégrée à l'application CamAPS FX ou le site Web de mylife Diabetes Care
- Contactez le service client de mylife Diabetes Care
- Pour toute questions en lien avec le capteur, contactez le service client de Dexcom

i Ce prospectus est destiné aux utilisateurs de myLoop. Suivez toujours les conseils de votre professionnel de santé lorsque vous modifiez une composante de votre traitement du diabète.

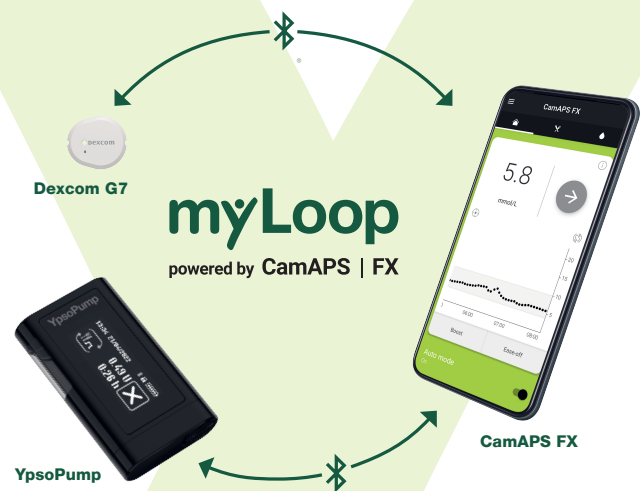

Comment passer de Dexcom G6 à Dexcom G7

- i** Si vous avez déjà un compte Dexcom, veuillez vous assurer d'être en mesure d'accéder à vos identifiants Dexcom, car vous en aurez besoin pour configurer la transition de l'application G7 à l'application CamAPS FX. Vous trouverez vos identifiants Dexcom dans l'application Dexcom G6/G7.

01 Vous utilisez déjà un capteur Dexcom G7 associé à l'application G7?

- Si vous utilisiez déjà l'application Dexcom G7, supprimez l'appairage dans l'application G7, forcez l'arrêt de l'application et patientez 15 minutes, autrement désinstallez simplement l'application G7 pour permettre une bonne connectivité en utilisant CamAPS FX.

Si vous n'avez jamais appairé votre pompe YpsoPump avec votre téléphone, **passer à l'étape 04**

02 Vous utilisez actuellement un capteur Dexcom G6 associé à CamAPS FX?

- Si vous exécutez une session Dexcom G6 via l'application CamAPS FX, arrêtez la session actuelle du capteur G6 dès que vous êtes prêt(e).
- Retirez le capteur Dexcom G6 de votre corps comme indiqué

03 Le Dexcom G7 apparaît-il dans le menu CGM de l'application CamAPS FX ?

Si le Dexcom G7 n'est pas visible dans l'écran de sélection du CGM :

iPhone (iOS)

- Notez d'abord votre **dose quotidienne totale (Total Daily Dose, TDD)** ainsi que votre **poids corporel**.
- Ouvrez les paramètres Bluetooth® de votre iPhone, sélectionnez votre pompe et appuyez sur **"Oublier cet appareil"**.
- Déconnectez-vous de l'application CamAPS FX (**Menu → Compte → Déconnexion**), puis reconnectez-vous.
- Suivez les instructions à l'écran pour reconnecter votre pompe et votre système CGM.

Android

- Reconnectez votre YpsoPump via le **menu Pompe**.
Le Dexcom G7 devrait désormais être visible dans l'écran de sélection du CGM.

04 Insérez un capteur Dexcom G7

- Appliquez le capteur Dexcom G7 conformément aux instructions du mode d'emploi de Dexcom
- Assurez-vous d'avoir correctement fixé le capteur

05 Connectez le dispositif Dexcom G7 à l'application CamAPS FX

- Ouvrez CamAPS FX
- Allez dans le menu → MCG
- Sélectionnez Dexcom G7
- Suivez les étapes affichées à l'écran pour appairer le capteur
 - Vous serez invité(e) à vous connecter à votre compte Dexcom et à accepter le partage de données vers le système Dexcom. Cette étape n'est nécessaire que lors de la première connexion d'un capteur Dexcom G7 ou en cas de réinstallation de l'application
- Patientez le temps que la période de préchauffage du dispositif Dexcom G7 se termine (~30 minutes à partir du moment où le capteur est posé)

Clause de non-responsabilité: les images de produits sont exclusivement proposées à fins d'illustration. // mylife, myLoop et YpsoPump sont des marques déposées de mylife Diabetes Care AG ou de ses filiales. // Dexcom, Dexcom G6 et Dexcom G7 sont des marques déposées de Dexcom, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. // CamAPS est une marque déposée de CamDiab Ltd. // La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par mylife Diabetes Care AG ou ses filiales est soumise à licence. // Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

 Pour obtenir des informations concernant la sécurité des produits mentionnés, consultez le mode d'emploi ou le site www.mylife-diabetescare.ch/securite



DiabetesCare

mylife Diabetes Care AG
Marché suisse
Lyssachstrasse 40 • 3400 Burgdorf
www.mylife-diabetescare.ch