

Guida al passaggio a Dexcom G7

Questa breve guida spiega come passare in modo agevole al sistema di monitoraggio glicemico continuo (CGM) Dexcom G7.

Prima di passare a Dexcom G7

● Accertati di:

i

- disporre di un sensore Dexcom G7;
- usare la versione più recente dell'app CamAPS FX;
- utilizzare uno smartphone compatibile con CamAPS FX e con il sensore di cui disponi.
 - Visita <https://camdiab.com/faq> per informazioni sulla compatibilità


Novità su Dexcom G7

- Trasmettitore e sensore tutto-in-uno
- Avviamento più rapido (circa 30 minuti)
- Periodo di tolleranza di 12 ore che ti offre la possibilità di sostituire il sensore quando preferisci

Buono a sapersi!

- Puoi passare dall'app G7 all'app CamAPS FX senza sostituire il sensore G7
- Puoi passare ad altri tipi di sensore compatibili in qualsiasi momento, ma puoi collegare un solo sensore CGM alla volta
- Tieni il telefono vicino al sensore durante l'associazione
- Se l'associazione del sensore non va a buon fine, disattiva e riattiva il Bluetooth, quindi riprova

i **Questo opuscolo è per gli utenti myLoop. Quando si modifica la terapia, seguire sempre i consigli del proprio operatore sanitario.**

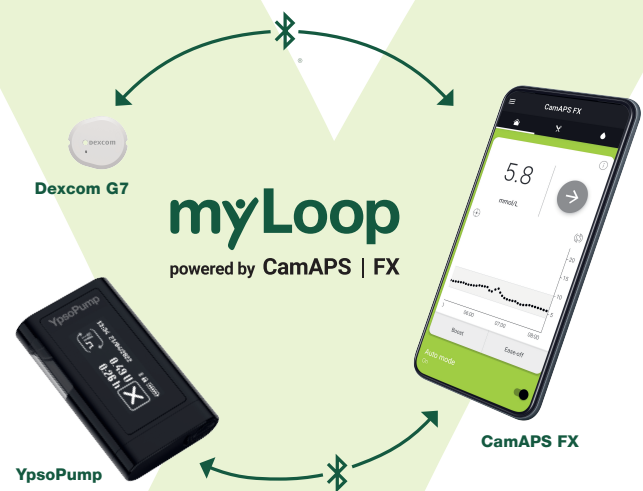

Come passare da Dexcom G6 a Dexcom G7

i Se disponi già di un account Dexcom, assicurati di ricordare le credenziali Dexcom, poiché ti serviranno durante la configurazione del G7 in CamAPS FX. Le credenziali Dexcom sono reperibili nell'app Dexcom G6/G7.

01 Stai già utilizzando un sensore Dexcom G7 nell'app G7?

- Se in precedenza utilizzavi l'app Dexcom G7, rimuovi l'associazione nell'app G7, chiudi forzatamente l'app e attendi 15 minuti, oppure disinstalla semplicemente l'app G7 per consentire una corretta connessione con CamAPS FX.
Se non hai mai associato YpsoPump al tuo telefono, **vai al punto 04.**

02 Stai utilizzando un sensore Dexcom G6 nell'app CamAPS FX?

- Se nell'app CamAPS FX è in corso una sessione con Dexcom G6, interrompi la sessione corrente del sensore G6 quando sei pronto.
- Rimuovi il sensore Dexcom G6 dal corpo come indicato.

03 Il Dexcom G7 è visibile nel menu CGM dell'app CamAPS FX?

Se Dexcom G7 non è visibile nella schermata di selezione del CGM:

iPhone (iOS)

- Innanzitutto, annota la tua **dose giornaliera totale (TDD)** e il tuo **peso corporeo**.
- Apri le impostazioni Bluetooth® del tuo iPhone, seleziona la pompa e tocca **"Dissocia questo dispositivo"**.
- Esci dall'app CamAPS FX (**Menu → Account → Disconnetti**) e accedi nuovamente.
- Segui le istruzioni sullo schermo per ricollegare la pompa e il sistema CGM.

Android

- Ricollega la tua YpsoPump tramite il **Menu Pompa**.
Dexcom G7 dovrebbe ora essere visibile nella schermata di selezione del CGM.

04 Inserisci un sensore Dexcom G7

- Applica il sensore Dexcom G7 seguendo le istruzioni per l'uso fornite da Dexcom.
- Assicurati che il sensore sia applicato correttamente.

05 Collega Dexcom G7 nell'app CamAPS FX

- Apri CamAPS FX.
- Vai al menu → CGM.
- Seleziona Dexcom G7.
- Segui i passaggi indicati sul display per associare il sensore:
 - Ti sarà chiesto di accedere al tuo account Dexcom e di accettare la condivisione dei dati con Dexcom. Questo passaggio è necessario solo la prima volta che colleghi un sensore Dexcom G7 o in caso di reinstallazione dell'app.
- Attendi il termine del periodo di avviamento di Dexcom G7 (~30 minuti dal momento di applicazione del sensore).

Serve aiuto? Per qualsiasi problema:

- Consulta la guida integrata nell'app CamAPS FX o il sito web di mylife Diabetes Care
- Contatta l'assistenza clienti di mylife Diabetes Care

Esclusione di responsabilità: le immagini dei prodotti hanno esclusivamente scopo illustrativo. // mylife e YpsoPump sono marchi registrati di mylife Diabetes Care AG o delle sue affiliate. // Dexcom, Dexcom G6 e Dexcom G7 sono marchi registrati di Dexcom, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. // CamAPS è un marchio registrato di CamDiab Ltd. // Altri nomi e marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.

 Per informazioni sulla sicurezza dei prodotti descritti, consultare il manuale d'uso o www.mylife-diabetescare.it/sicurezza



DiabetesCare

mylife Diabetes Care Italia S.r.l.
via Bizzozzero, 11 • 21100 Varese (VA)
www.mylife-diabetescare.it