

Průvodce přechodem na systém Dexcom G7

V tomto stručném průvodci je vysvětleno, jak jednoduše přejít na systém kontinuálního monitorování glukózy (CGM) Dexcom G7.

Než přejdete na nový systém

Zkontrolujte, zda:

- i** Máte připravený senzor Dexcom G7
- Používáte nejnovější verzi aplikace CamAPS FX
- Váš chytrý telefon je kompatibilní s aplikací CamAPS FX a s vaším senzorem
 - Průvodce kompatibilitou najdete na webu <https://camdiab.com/faq>.

Jaké novinky přináší Dexcom G7?

- Senzor a vysílač v jednom
- Rychlejší zahřívání (přibližně 30 minut)
- Tolerance 12 hodin na výměnu senzoru nabízí větší flexibilitu

Je dobré vědět

- Na aplikaci G7 můžete z aplikace CamAPS FX přejít i bez výměny senzoru G7.
- Kompatibilní senzory můžete střídat kdykoli po ukončení relace senzoru, ale připojený může být vždy pouze jeden.
- Během párování mějte telefon poblíž senzoru.
- Pokud se párování nezdaří, vypněte a zapněte Bluetooth a zkuste to znovu.

i Tento leták je určený pro uživatele myLoop. Při každé změně součástí léčby diabetu se vždy řiďte pokyny lékaře.



Jak přejít z Dexcom G6 na Dexcom G7

- i** Pokud už máte účet Dexcom, připravte si přihlašovací údaje do účtu Dexcom, protože je budete potřebovat při nastavování G7 v aplikaci CamAPS FX. Přihlašovací údaje do účtu Dexcom najdete v aplikaci Dexcom G6/G7.

01 Už používáte senzor Dexcom G7 v Dexcom G7?

- Pokud už jste aplikaci Dexcom G7 používali, zrušte v aplikaci Dexcom G7 spárování, vynuceně ukončete aplikaci a počkejte 15 minut. Nebo můžete také aplikaci Dexcom G7 odinstalovat, aby připojení pomocí aplikace CamAPS FX fungovalo správně.

Pokud jste ještě nikdy nepárovali pumpu YpsoPump s telefonem, **přejděte do kroku 04**

02 Používáte senzor Dexcom G6 v aplikaci CamAPS FX?

- Pokud máte v aplikaci CamAPS FX spuštěnou relaci se senzorem Dexcom G6, ukončete aktuální relaci se senzorem G6, jakmile budete připraveni.
- Odstraňte senzor Dexcom G6 podle pokynů

03 Je Dexcom G7 viditelný v nabídce CGM aplikace CamAPS FX?

Pokud Dexcom G7 není viditelný na obrazovce výběru CGM:

iPhone (iOS)

- Nejprve si poznamenejte svou aktuální **celkovou denní dávku inzulínu (TDD)** a svou **tělesnou hmotnost**.
- Otevřete nastavení Bluetooth® svého iPhoneu, vyberte pumpu a klepněte na "**Zapomenout toto zařízení**".
- Odhlaste se z aplikace CamAPS FX (**Menu → Účet → Odhlásit se**) a poté se znovu přihlaste.
- Podle pokynů na obrazovce znovu připojte pumpu a CGM systém.

Android

- Znovu připojte svou YpsoPump prostřednictvím **Menu pumpy**.
- Dexcom G7 by nyní měl být viditelný na obrazovce výběru CGM.

04 Zavedení senzoru Dexcom G7

- Zaveďte senzor Dexcom G7 podle pokynů k použití od společnosti Dexcom.
- Zkontrolujte, zda senzor bezpečně drží.

05 Připojte senzor Dexcom G7 v aplikaci CamAPS FX

- Spusťte aplikaci CamAPS FX.
- Přejděte do nabídky → CGM.
- Zvolte Dexcom G7.
- Spárujte senzor podle pokynů na displeji.
 - Systém vás vyzve, abyste se přihlásili do účtu Dexcom a potvrdili sdílení dat se společností Dexcom. Tento krok je nutný, pouze když senzor Dexcom G7 připojujete poprvé nebo když aplikaci přeinstalováváte.
- Počkejte, než se senzor Dexcom G7 zahřeje (přibl. 30 minut po zavedení senzoru).

Potřebujete pomoc? Pokud se vyskytne nějaký problém:

- Podívejte se do nápovědy v aplikaci CamAPS FX nebo na web mylife Diabetes Care.
- Kontaktujte oddělení péče o zákazníky mylife Diabetes Care na telefonním čísle 800 140 440.
- S dotazy k senzoru se obraťte na oddělení podpory společnosti Dexcom.

Upozornění: Obrázky produktů jsou pouze pro ilustraci. // mylife a YpsoPump jsou registrované ochranné známky společnosti mylife Diabetes Care AG nebo jejich přidružených společností. // Dexcom, Dexcom G6 a Dexcom G7 jsou registrované ochranné známky společnosti Dexcom, Inc. ve Spojených státech amerických a případně v dalších zemích. // CamAPS je registrovaná ochranná známka společnosti CamDiab Ltd. // Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

 Bezpečnostní informace k uvedeným produktům naleznete v návodu k použití nebo na webu www.mylife-diabetescare.cz/bezpecnost



DiabetesCare

mylife Diabetes Care s.r.o.
Vinohradská 1597/174 • 130 00 Praha 3
www.mylife-diabetescare.cz