


## Application CamAPS FX

### Outil de soutien à la formation dans l'application

La formation dans l'application pour le système CamAPS FX doit être terminée avant que l'utilisateur ne puisse commencer à utiliser l'application avec une véritable pompe YpsoPump. Cet outil remplace la plateforme de formation en ligne que CamDiab proposait auparavant. La formation dans l'application est conçue pour être suivie et terminée par les utilisateurs à domicile, avant de commencer l'utilisation officielle de la pompe et de l'application CamAPS FX avec l'équipe soignante. L'objectif est de permettre à l'utilisateur de comprendre le processus de préparation et l'utilisation de l'application, et d'obtenir des informations supplémentaires sur les différentes fonctionnalités de l'application CamAPS FX. La formation comprend différents modules. Pour chaque module, l'utilisateur doit regarder des petites vidéos et réaliser des exercices pratiques (par ex. administrer un bolus d'insuline en mode virtuel) pour mettre en pratique les connaissances acquises. L'utilisateur doit réussir tous les modules essentiels et tous les exercices pour achever la formation. Une fois la formation dans l'application achevée, l'utilisateur saura appairer une vraie pompe avec l'application.

- ❗ **Important: le démarrage de la pompe et de l'application avec l'équipe soignante n'est possible qu'une fois la formation achevée. L'équipe soignante peut également parcourir la formation dans l'application avec l'utilisateur, si une aide supplémentaire est requise.**

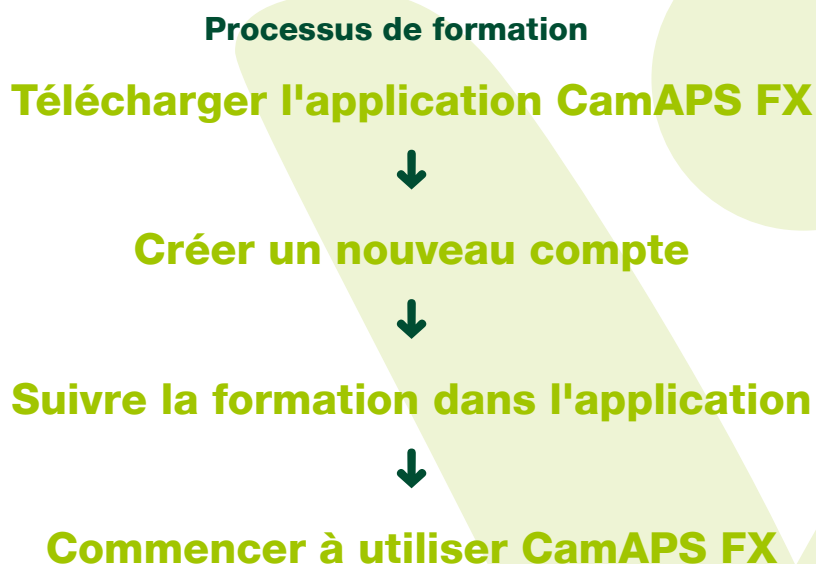

## Télécharger l'application CamAPS FX

L'utilisateur doit télécharger l'application CamAPS FX depuis le Google Play Store avant de démarrer la pompe et l'application CamAPS FX.



Application CamAPS FX mmol/L


- Remarque: une connexion Internet est requise pendant le processus de téléchargement et l'enregistrement de l'application. En soit, la formation dans l'application peut être suivie sans connexion Internet. Si un utilisateur reçoit le message d'erreur "Support de formation non téléchargé" (training material not downloaded), il doit se connecter à Internet et tenter une nouvelle fois d'accéder à la formation.**

## Créer un nouveau compte

Les nouveaux utilisateurs de CamAPS FX doivent créer un compte pour se connecter à l'application. Ils doivent utiliser une adresse e-mail à laquelle ils peuvent facilement accéder. Ils recevront les codes par e-mail pour une authentification multifactorielle lors de la création du compte, ainsi que pour réinstaller l'application ou se déconnecter et se reconnecter à l'application. Tous les utilisateurs formés avant le 8 avril, et qui ont déjà saisi le code de formation dans l'application mylife CamAPS FX, n'ont pas besoin d'effectuer la formation dans l'application. L'application reconnaît automatiquement les utilisateurs qui ont déjà suivi la formation. Les informations sur la formation dans l'application sont disponibles dans le menu "Aide" de l'application, pour une éventuelle consultation.

### Choisir l'option "Formation dans l'application" (In-app training)

Lors de la configuration de l'application, l'option "Formation dans l'application" doit être sélectionnée pour démarrer la formation en question. Une fenêtre contextuelle apparaîtra pour informer l'utilisateur que la formation dans l'application doit être effectuée. Lors de la configuration de l'application CamAPS FX avec des dispositifs virtuels ou en tant que Companion, il n'est pas nécessaire d'effectuer la formation dans l'application.

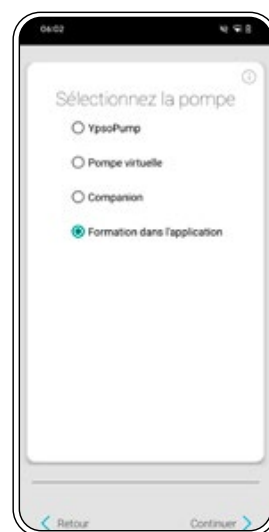


## Terminer les modules essentiels de la formation dans l'application

Pour terminer la formation dans l'application avec succès, il faut avoir suivi les 3 modules essentiels (démarrage l'application, fonctionnalités de l'écran d'accueil (Principales fonctionnalités) et fonctionnalités du menu principal). Des vidéos supplémentaires sont disponibles dans l'aperçu des modules suivants. Ces modules supplémentaires (Informations supplémentaires) peuvent être consultés dans la section "Aide" du menu principal de l'application CamAPS FX.

### Évaluer la formation dans l'application

À la fin de la formation, l'utilisateur peut évaluer son expérience de la formation. Il est possible d'attribuer 1 étoile (pour très mauvaise) à 5 étoiles (pour très bonne). Il est également possible de télécharger des fiches de formation avec toutes les informations contenues dans la formation dans l'application. Les fiches seront enregistrées dans le dossier de téléchargement du téléphone de l'utilisateur.

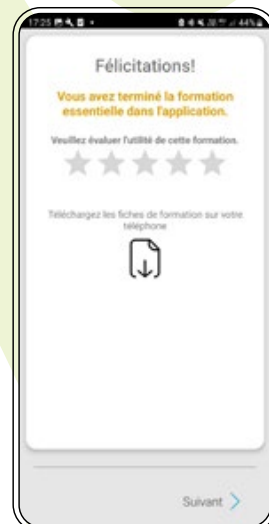


## Commencer à appairer la pompe YpsoPump avec l'équipe soignante

À présent, l'utilisateur a deux options:

- Appuyer sur "Retour" pour rester en mode virtuel. Cette option est sélectionnée lorsque l'utilisateur n'a pas encore reçu de formation technique sur la pompe.
- Appuyer sur "Suivant" pour appairer la pompe YpsoPump et le capteur.

Après avoir sélectionné "Suivant", la procédure d'appairage de la pompe démarre et l'application CamAPS FX guide l'utilisateur tout au long du processus de configuration.

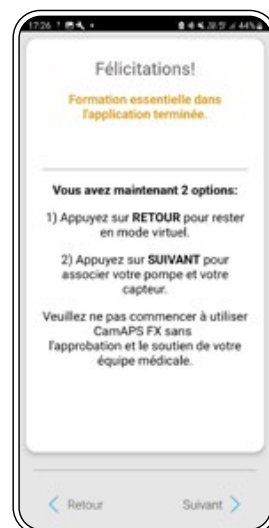

**i La pompe YpsoPump et le capteur doivent être appairés avec l'aide et l'autorisation de l'équipe soignante. Lors du démarrage de CamAPS FX avec l'équipe soignante, il est important de passer en revue le calculateur de bolus, la cible personnalisée de glucose et les paramètres d'alertes. Ne pas oublier d'appairer l'application avec Glooko® et d'inviter des Companions, le cas échéant, via le menu "Partager".**

## Conseils et astuces pour gérer la formation dans l'application

- Pour afficher les sous-titres des animations, l'utilisateur peut basculer l'écran de son smartphone en mode paysage.
- Pour finir les tâches des modules de formation "Configuration du calculateur de bolus" et "Alertes", tous les paramètres et toutes les alertes doivent être enregistrés. L'utilisateur peut utiliser les paramètres déjà validés avec l'équipe soignante, ou il peut confirmer et utiliser les valeurs par défaut de l'application.
- Une fois la formation dans l'application terminée, l'utilisateur peut télécharger les fiches résumant le contenu des animations. Les fiches seront enregistrées dans la section "Téléchargement" (Download) du téléphone de l'utilisateur. Pour ouvrir les fiches, l'application PDF viewer est requise.
- Les vidéos de la formation dans l'application peuvent être consultées dans la section "Aide" de l'application CamAPS FX.
- La dose totale quotidienne (DTQ) et le poids corporel doivent être à nouveau saisis lors de la connexion à la pompe YpsoPump. Les paramètres des alertes et du calculateur de bolus saisis dans le cadre de la formation dans l'application seront enregistrés dans l'application une fois la pompe appairée. Une nouvelle cible personnalisée de glucose peut être définie si le réglage par défaut de 5.8 mmol/L ne s'applique pas. La cible personnalisée de glucose peut être réglée dans les menus "Paramètres" et "Cible personnalisée de glucose" de l'application. Tous les réglages doivent être examinés conjointement avec l'équipe soignante.
- Le partage de données avec Glooko® peut être configuré une fois la formation achevée.
- Les utilisateurs de CamAPS FX, les companions et les personnes qui utilisent l'application en mode virtuel peuvent accéder aux vidéos de la formation dans l'application et aux fiches via le menu "Aide" de leur application.

**Disclaimer:** Les images de produits sont exclusivement proposées à fins d'illustration. // mylife, myLoop et YpsoPump sont des marques déposées de mylife Diabetes Care AG ou de ses filiales. // CamAPS est une marque déposée de CamDiab Ltd. // Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

 Pour obtenir des informations concernant la sécurité des produits mentionnés, consultez le mode d'emploi ou le site [mylife-diabetescare.ch/securite](http://mylife-diabetescare.ch/securite)