

Happy pet,
happy life!



Join the Suitical family!

   @suitical #suiticalfamily



Share your recovery and win!



Sign up for our newsletter
and stay updated!

Recovery Sleeve Cat


Manchon de récupération pour chats • Genesungsärmel für Katzen • Manga de recuperación para gatos



Suitical

How to put the sleeve on the cat?

FR: Comment mettre la manche à votre chat ?
DE: Wie zieht man der Katze den Ärmel an?
ES: ¿Cómo ponerle la manga a su gato?

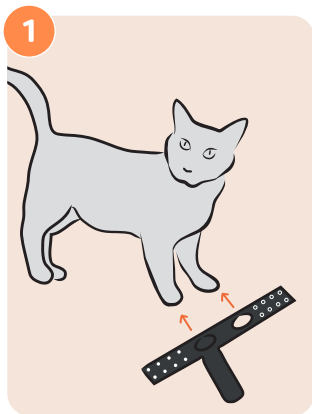

Suitable for the left and right leg

FR: Utilisable pour les pattes avant gauche et droite
DE: Für die linke und rechte Vorderpfote geeignet
ES: Adecuado para la pata delantera izquierda y derecha



EN: The Recovery Sleeve is designed to be perfectly symmetrical, allowing it to fit your cat's left or right front leg with ease.

FR: Le Recovery Sleeve est conçu de manière parfaitement symétrique, ce qui lui permet de s'adapter facilement à la patte avant gauche ou droite de votre chat.

DE: Der Recovery Sleeve ist perfekt symmetrisch gestaltet, sodass er problemlos am linken oder rechten Vorderbein Ihrer Katze getragen werden kann.

ES: El Recovery Sleeve está diseñado de forma perfectamente simétrica, lo que permite colocarlo fácilmente en la pata delantera izquierda o derecha de su gato.

Scan for the tutorial video!

FR: Scannez pour voir la vidéo tutorielle !
DE: Scannen Sie für das Anleitungsvideo!
ES: ¡Escanea para ver el video tutorial!!

links.suitical.com/insert-recovery-sleeve-cat

Scan for product information


FR: Scannez pour plus d'informations
DE: Scannen Sie für Produktinformationen
ES: Escanea para obtener más información
links.suitical.com/insert-recovery-sleeve-cat



Washing instructions



FR: Instructions de lavage
DE: Waschanleitung
ES: Instrucciones de lavado

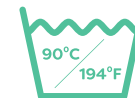

EN: Wash at a maximum of 90°C/194°F.
FR: Laver à une température maximale de 90 °C / 194 °F.
DE: Bei maximal 90 °C / 194 °F waschen.
ES: Lavar a una temperatura máxima de 90°C / 194°F.

EN: Do not tumble dry.
FR: Ne pas sécher en machine.
DE: Nicht im Trockner trocknen.
ES: No secar en secadora.



EN: Iron on low heat.
FR: Repasser à basse température.
DE: Bei niedriger Temperatur bügeln.
ES: Planchar a baja temperatura.

EN: Consider a second Recovery Sleeve, so your pet always has a clean one while washing.

FR: Pensez à un deuxième produit, pour que votre animal ait toujours un produit propre pendant le lavage.

DE: Erwägen Sie ein zweites Produkt, damit Ihr Haustier während des Waschens immer ein sauberes Produkt hat.

ES: Considere un segundo traje de recuperación, para que su mascota siempre tenga uno limpio mientras se lava el otro.