

Recovery Suit Dog

Vêtement de récupération pour chiens • Genesungsanzug für Hunde
• Traje de recuperación para perros



Suitical

How to put the suit on the dog?


FR: Comment mettre la combinaison à votre chien ?

DE: Wie ziehen Sie Ihrem Hund den Anzug an?


ES: ¿Cómo ponerle el traje a tu perro?



1

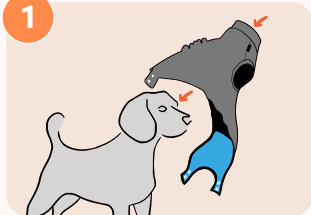

2

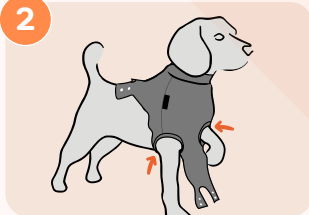


EN: Make sure that the blue inner layer is against the belly.

FR: Assurez-vous que la couche intérieure bleue est contre le ventre.


DE: Stellen Sie sicher, dass die blaue Innenschicht am Bauch anliegt.

ES: Asegúrate de que la capa interior azul quede contra el vientre.

3

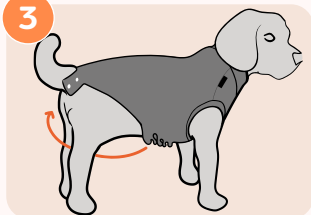

4

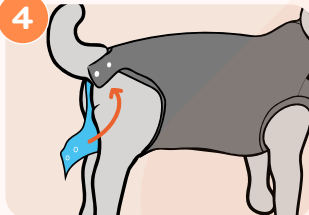

Scan for the tutorial video!

FR: Scannez pour voir le tutoriel vidéo !

DE: Scannen Sie für das Anleitungsvideo!

ES: ¡Escanea para ver el video tutorial!

<https://links.suitical.com/insert-tutorial-recovery-suit-dog>

Happy pet,
happy life!



Going for a walk?

FR: Vous partez en promenade ?

DE: Gehen Sie spazieren?

ES: ¿Vas a salir a pasear?



EN: No need to remove the entire Recovery Suit. Just unfasten the back and roll the suit inward. Then pull out the inner strap and secure it to the chest using the press stud.

FR: Il n'est pas nécessaire de retirer entièrement le produit. Détachez simplement l'arrière et enroulez le produit vers l'intérieur. Ensuite, sortez la sangle intérieure et fixez-la sur la poitrine à l'aide du bouton-pression.

DE: Es ist nicht notwendig, das Produkt vollständig auszuziehen. Öffnen Sie einfach die Rückseite und rollen Sie das Produkt nach innen. Ziehen Sie dann den inneren Gurt heraus und befestigen Sie ihn mit dem Druckknopf an der Brust.

ES: No necesitas quitar todo el traje de recuperación. Desabrocha la parte trasera y enrolla el traje hacia dentro. Después, saca la correa interior y fíjala al pecho con el botón a presión.

Scan for product information

FR: Scannez pour plus d'informations

DE: Scannen Sie für Produktinformationen

ES: Escanea para obtener más información

links.suitical.com/insert-recovery-suit-dog



Washing instructions

Tips and tricks

FR: Instructions de lavage

DE: Waschanleitung

ES: Instrucciones de lavado



EN: Wash at a maximum of 90°C/194°F.

FR: Laver à une température maximale de 90 °C / 194 °F.

DE: Bei maximal 90 °C / 194 °F waschen.

ES: Lavar a una temperatura máxima de 90°C / 194°F.

EN: Do not tumble dry.

FR: Ne pas sécher en machine.

DE: Nicht im Trockner trocknen.

ES: No secar en secadora.



EN: Iron on low heat.

FR: Repasser à basse température.

DE: Bei niedriger Temperatur bügeln.

ES: Planchar a baja temperatura.

EN: Consider a second Recovery Suit, so your pet always has a clean one while washing.

FR: Pensez à un deuxième produit, pour que votre animal ait toujours un produit propre pendant le lavage.

DE: Erwägen Sie ein zweites Produkt, damit Ihr Haustier während des Waschens immer ein sauberes Produkt hat.

ES: Considera un segundo traje de recuperación, para que tu mascota siempre tenga uno limpio mientras se lava el otro.

Join the Suitical family!



@suitical #suiticalfamily



Share your recovery and win!



Sign up for our newsletter
and stay updated!