



Sélection W&H

## Proface pour voir les caries autrement



Avec Proface, les bactéries de la dentine infectée sont mises en évidence sous sonde lumineuse pour un contrôle peu invasif et une prévention efficace.

**P**roface permet d'effectuer une excavation sélective par un contrôle permanent de la présence de dentine infectée dans les cavités ouvertes. Le secret de Proface ? La méthode Face (Fluorescence Aided Caries excavation – aide à l'excavation des caries par fluorescence). Les bactéries présentes dans la dentine infectée libèrent des métabolites (porphyrines) non visibles à l'œil nu, mais qui apparaissent rouge fluorescent sous un éclairage violet. Proface s'appuie sur ce phénomène : dès lors que la cavité ouverte est illuminée avec la sonde lumineuse, la porphyrine apparaît rouge fluorescent et la substance dentaire saine vert fluorescent. Les lunettes de diagnostic Proface accentuent encore ce contraste. ▀



### Le contrôle des caries simplifié

Prévention efficace de la récurrence carieuse, méthode sélective et peu invasive, application sûre et indolore, tels sont les principaux avantages pour le dentiste et les patients : le contrôle des caries n'a jamais été aussi simple ! Le retrait des excès est aisé.

### Contact

W&H France  
Tél. : 03 88 77 36 00  
[www.wh.com](http://www.wh.com)

**STAND ADF  
2M31**