




# Wichtige Hinweise zur Wiederaufbereitung

## Diese Schutzmaßnahmen sind zu beachten:

- › **Desinfizieren** Sie Ihre Hände und ziehen frische Handschuhe an, wenn Sie die Maske absetzen und verstauen.
- › **Kontrollieren** Sie die Maske auf Unversehrtheit und Sauberkeit (visueller Check).
- › **Legen** sie die Masken in den Sterilisator wie in der Bilderreihe unten beschrieben. Die Masken können unverpackt sterilisiert werden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Masken nach dem Sterilisationsprozess sofort wiederverwendet und nicht zwischengelagert werden.
- › **Hinweis:** Wird die Maske nicht sofort wiederaufbereitet/sterilisiert, bitte in einem dafür geeigneten und gut gekennzeichneten Behälter an einem trockenen (nur für das geschulte Personal) zugänglichen Ort zwischenlagern.
- › **Abschließend**, ziehen Sie die Handschuhe fachgerecht ab und entsorgen diese. Führen anschließend eine gründliche Händedesinfektion durch.

Legen Sie die Masken in den Sterilisator und betätigen das Zyklusprogramm 121°C. **Bei einer optimalen Beladung können ca. 40-60 Masken pro Zyklus wiederaufbereitet werden** (je nach Maskengröße).

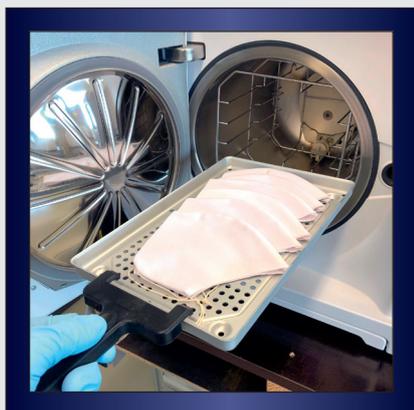



## Behelfs-Mundschutz aus Stoff und Chirurgiemasken (NR)/MNS-Masken

Der weitverbreitet eingesetzte – und auch selbsthergestellte – Mundschutz aus Stoff (auch mehrlagiger, dichtenliegender Mund-Nasen-Schutz) dient zum Fremdschutz. Die Übertragung von möglich freigesetzten infektiösen Tröpfchen durch den Träger auf dessen Gegenüber sollen dadurch behindert werden. Die Maske soll dabei schützen, dass die Tröpfchen von anderen Personen nicht eingeatmet werden, oder auf Schleimhäute und Wunden gelangen.

Empfohlen wird zwar die einmalige Verwendung, aber bei zwingendem Bedarf (Mangel) können diese auch ebenfalls wiederaufbereitet werden – mittels Sterilisation **im 121°C-Zyklus**. Bitte achten Sie bei der Wiederaufbereitung auch auf die Schutzmaßnahmen/die Handhabung wie beschrieben.



## FFP2- und FFP3-Masken

Bei der Wiederaufbereitung von FFP2- und FFP3-Masken (zum einmaligen Gebrauch) wird die Filterwirkung und Atmungskapazität bei der Dampfsterilisation beibehalten und sichert somit eine weitere Verwendung.

- ▶ Die Dampfsterilisation im **121°C-Zyklus** eignet sich für FFP2- und FFP3-Masken mit oder ohne Ausatemventil.
- ▶ Die mit Dampf sterilisierten Masken können ein bis mehrere Male wiederverwendet werden (Dokumentation der Sterilisationszyklen auf der Verpackung).
- ▶ Achten Sie unbedingt darauf, dass die wiederaufbereiteten sterilen Masken getrennt von noch nicht wiederaufbereiteten Masken gelagert werden.
- ▶ Gebrauchte, noch feuchte Masken in geschlossenem Gebinde bitte nicht zwischengelagern, da dies zur Vermehrung von Bakterien und Schimmelpilzen führen kann.
- ▶ Masken, die bei Covid-19-Verdachtsfällen oder -Erkrankten verwendet wurden, erhöhen die Gefahr bzgl. Kreuzkontamination. Diese Masken können unter Beachtung der dafür erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen und von geschultem Personal aufbereitet oder entsorgt werden.

#whdentalwerk



wh.com




## Schutzkleidung

Die Schutzkleidung wird täglich oder bei sichtbarer Verschmutzung oder Kontamination gewechselt werden. Wird die Schutzkleidung als wiederverwendbar getragen, insbesondere bei Behandlungen mit erregerehaltigen Aerosolen, kommt es zu einer Kontamination und eine entsprechende hygienische Aufbereitung (thermisch oder chemothermisch) ist erforderlich. Nutzen Sie hierfür die universelle Einsetzbarkeit des Typ B-Sterilisators:

Mit dem Zyklusprogramm **B-Universal 121°C** können Sie Ihre medizinische Bekleidung wiederaufbereiten und vermindern dadurch die Verbreitung von Mikroorganismen. Achten Sie bitte sowohl auf das Beladungsschema (wie bei der Masken-Wiederaufbereitung) als auch auf die Verwendung von trockenen und sterilen Gegenständen.

*Hinweis: Bei der medizinischen (OP-) Bekleidung wird zwischen High-Performance und Standard-Performance-Produkten unterschieden, beachten Sie die Norm EN 13795 1-3.*

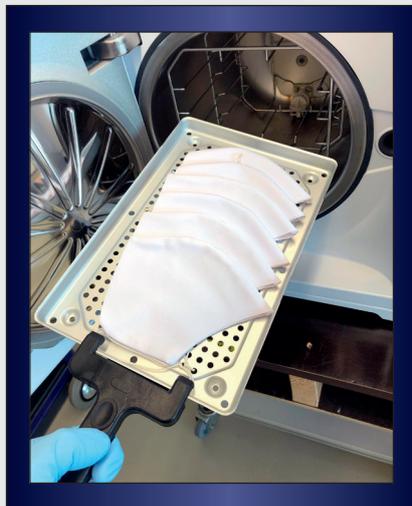

Es ist uns ein besonders großes Anliegen Sie in dieser herausfordernden Zeit bestmöglich zu unterstützen und Ihnen als Partner zur Seite zu stehen. **Für alle weiteren Details steht Ihnen Ihr W&H-Ansprechpartner gerne zur Verfügung.**

**Kontaktieren Sie uns unter:**

☎ +43 6274 6236-239

✉ office.at@wh.com

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Lösungen und Tips:

**wh.com, infectionprevention**