

Conseils techniques sur la coupure des appareils d'hygiène lors d'une fermeture prolongée d'un cabinet



Les services techniques de W&H France vous donnent quelques conseils techniques pour vos appareils d'hygiène en cas de fermeture prolongée de votre cabinet pour une meilleure reprise de l'activité :

✓ **Stérilisateur :**

- Vidanger le réservoir d'eau propre
- Vidanger le réservoir d'eau usée (non nécessaire si vidange automatique)
- Fermer l'arrivée d'eau (si alimentation automatique)
- Couper l'alimentation électrique du stérilisateur
- Laisser la porte de votre stérilisateur entre-ouverte

✓ **DAC :**

- Vidanger le réservoir d'eau
- Vidanger le réservoir d'eau de récupération (non nécessaire si vidange automatique)
- Couper l'arrivée d'air comprimé (si remplissage automatique)
- Fermer l'arrivée d'eau (si alimentation automatique)

✓ **Assistina 301 +, Twin et 3x3 :**

- Couper l'arrivée d'air comprimé
- Couper l'alimentation électrique (uniquement pour les Assistina 3x3)

✓ **Laveurs-désinfecteurs :**

- Couper l'alimentation électrique
- Couper l'alimentation en eau
- Laisser la porte entre-ouverte

Une permanence téléphonique est assurée, afin de vous délivrer des informations personnalisées à distance.

N'hésitez pas à nous contacter au 03 88 77 47 95.

LORS DE LA REOUVERTURE DU CABINET :

Appelez notre service technique, afin de vous apporter le support nécessaire et vous transmettre les conseils liés aux inconvénients possibles à la remise en route après un arrêt prolongé.

PERMANENCE SERVICE TECHNIQUE APPAREILS D'HYGIENE
03 88 77 47 95