

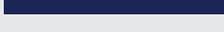
#wh_schweiz



wh.com/de_switzerland



Indikatoren und ihre Verwendung

Indikatoren	Verwendung	Wann
<p>Halterung zu Indikator Wash Check REF IMS-1200H</p> 	<p>Halterung</p>	
<p>Indikator für das Ultraschallbad REF IMS-1200U, 50stk.</p> 	<p>Führen Sie einmal pro Woche vor Benutzung des Geräts einen Leerzyklus mit dem Indikator durch und während des Tages auch Füllzyklen, bevor Sie die Instrumente einsetzen.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Optimales Reinigungsergebnis  unzureichendes Reinigungsergebnis </div>	<p>1x pro Woche</p>
<p>Indikator für den Thermodesinfektor (RDG) REF IMS-1200W, 50stk.</p> 	<p>Führen Sie einmal pro Tag bei der ersten Ladung eine Prüfung mit einem Indikator durch. Die Positionierung des Indikators erfolgt in der oberen Ebene (obere Korb). Das RDG steht am Ende der roten Zone.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Optimales Reinigungsergebnis  unzureichendes Reinigungsergebnis </div>	<p>1x pro Tag bei der ersten Ladung</p>
<p>Siegelnahttest für das Folienversiegelungsgerät REF T802100X, Sealcheck</p> 	<p>Test zur Kontrolle der Verschlussicherheit von versiegelten Sterilgutverpackung</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Fehlerfrei erzeugte Siegelnaht</p> <p>Fehler: Luftkanäle/Lufteinschlüsse in der Siegelnaht</p> <p>Fehler: unscharfe Konturen in der Siegelnaht</p> </div> </div>	<p>Minimum 1x pro Woche</p>
<p>Indikator für den Sterilisator Prion Programm REF T800220X</p> 	<p>Mini Steam Star Prion G (Indikator der Klasse 6 DIN EN ISO 11140-1 zur Überwachung der Dampfsterilisation)</p> 	<p>Bei jedem Prion Programm und bei verpackten Instrumenten mindesten 1 Indikator in die Verpackung</p>
<p>Indikator für den Sterilisator Universal Programm REF T800221X</p> 	<p>(Indikator der Klasse 5 DIN EN ISO 11114-1 zur Überwachung der Dampfsterilisation)</p> 	<p>Bei jedem Universal Programm bei verpackten Instrumenten mindesten 1 Indikator in die Verpackung</p>
<p>Dampfdurchdringungstest für den Sterilisator Helix Test REF T800207X Helix Testpackung. 1x Prüfkörper mit 250 Teststreifen</p> 	<p>Dies ist ein Prüfkörper für „Klasse B“-Autoklaven, der die schwierigsten Anforderungen an die Sterilisation von Hohlkörper-Instrumenten simuliert.</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  unbehandelt  fehlerhaft  bestanden </div>	<p>1x täglich vor Inbetriebnahme des Sterilisators. ACHTUNG: Kammer muss Leer sein</p>



Tamara Hinnen

Sales Manager
Tel.: +41 79 740 05 05
tamara.hinnen@wh.com
Region: ZH, TG, SH



Sabine Bittner

Hygieneberaterin (Aussendienst)
Verkaufs- und Marketingassistentin
+41 79 371 01 75
sabine.bittner@wh.com



Florian Brüllhart

Sales Manager
Tel.: +41 79 6420541
florian.bruehlhart@wh.com
Region: BE, FR, SO, NE,
JU, VS, GE



Fredy Gerber

Sales Manager
Tel.: +41 79 740 13 13
fredy.gerber@wh.com
Region: LU, ZG, OW, NW, UR,
SZ, GL, SG, AI, AR, GR



Konstantin Vogel

Röntgenspezialist /
Sales Manager
Tel.: +41 79 733 86 10
konstantin.vogel@wh.com
Region: BS, BL, AG