




PROTOCOLE D'UTILISATION

Préparation du bain

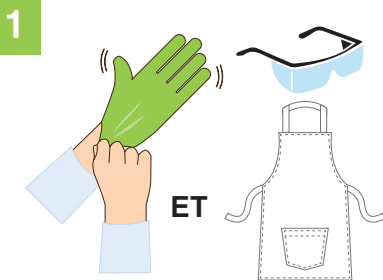


Porter des équipements de protection individuels adaptés.




Dans une Step One-Box propre, préparer une solution de Step One-i à 0,5 % en effectuant une pression de pompe doseuse (15 ml) complétés à 3 litres d'eau (ou 25 ml complétés à 5 litres d'eau).
La solution peut être préparée maximum 72 heures à l'avance.


Pré-désinfection des dispositifs médicaux

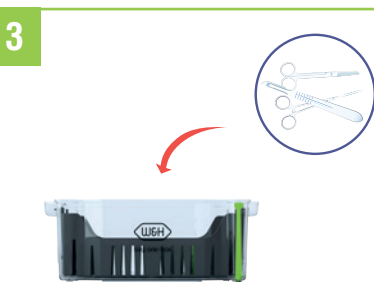

Immerger entièrement les dispositifs médicaux souillés dans la solution Step One-i dès la fin d'un soin et refermer le couvercle de la Step One-Box.

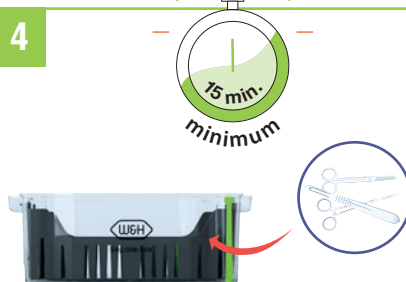

Laisser immerger les dispositifs médicaux dans la solution 15 minutes minimum (cf fiche technique). L'intégrité des instruments est garantie jusqu'à 72h d'immersion.

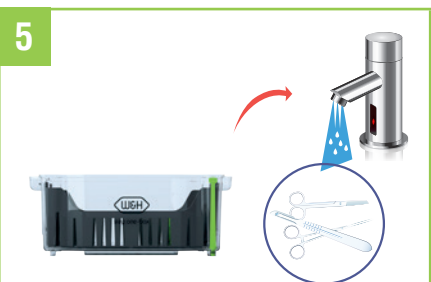

Rincer les dispositifs médicaux à l'eau du robinet.

6 Passer ensuite à la phase de nettoyage des dispositifs médicaux.