



Détergent désinfectant pour la
 pré-désinfection des dispositifs médicaux

step one-i



5 L

1 000 LITRES
 de solution avec
 1 bidon de 5 L

Indications

Nettoyage et désinfection
 des dispositifs médicaux
 par immersion
 avant stérilisation.

Avantages du produit

- + pH neutre : compatible avec tout type d'instruments.
- + Temps de contact 15 min.
- + Intégrité des instruments garantie pendant 72h de trempage.
- + Efficacité prouvée sur le biofilm.
- + Utilisable en bac à ultrasons.
- + Compatible avec un large panel de matériaux.
- + Économique.



Composition

Agents tensioactifs non ioniques,
 agents séquestrants, ammonium
 quaternaire.

Propriétés microbiologiques

Actif sur	Normes	Concentration	Temps de contact
Bactéricidie	EN 13727, EN 13697	0,5%	5 minutes
	EN 14561	0,5%	15 minutes
	EN 1276	0,25%	5 minutes
Levuricidie	EN 13624, EN 13697	0,5%	5 minutes
	EN 14562	0,5%	15 minutes
	EN 1650	0,25%	5 minutes
Virucidie	EN 14476 <i>Virus PRV (modèle de l'hépatite B)</i>	0,5%	5 minutes
	EN 14476 + A1 <i>Virus DBV (modèle de l'hépatite C)</i>	0,5%	5 minutes
	EN 14476 + A1 <i>Virus VIH</i>	0,5%	15 minutes
	EN 14476 + A2 <i>Herpès Virus</i>	0,5%	5 minutes
	EN 17111 <i>Vaccinia Virus</i>	0,5%	15 minutes

Détergent désinfectant pour la pré-désinfection des dispositifs médicaux

Caractéristiques

- > Aspect : liquide opalescent
- > pH à 0,5% : 7
- > Péréemption : 2 ans

Conditionnement


- > **Bidon de 5 L**
Réf SO-I-5/1
- > **Carton de 4 bidons de 5 L**
Réf SO-I-5/4



Protocole d'utilisation

1 Préparation du bain à 0,5% :

- > Porter des Équipements de Protection Individuelle appropriés (se référer à la Fiche de Données de Sécurité).
- > Verser 15 ml de Step One-i et compléter jusqu'à 3 litres d'eau ou 25 ml de Step One-i et compléter jusqu'à 5 litres d'eau du réseau puis homogénéiser la solution.

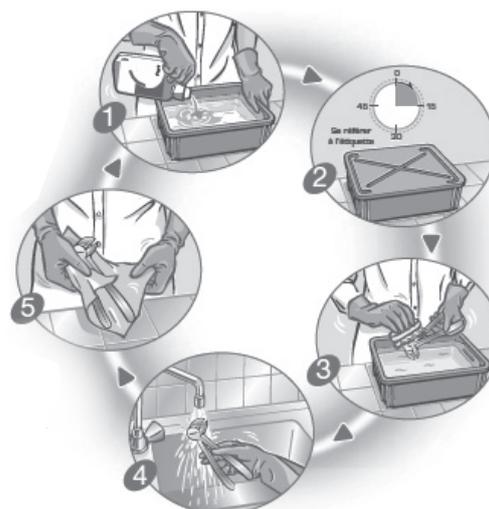

Utilisation :

- 1 Immerger entièrement les dispositifs médicaux souillés dans le bain.
- 2 Temps de contact : 15 minutes.
- 3 Brosser les dispositifs médicaux, et les écouvillonner si nécessaire.
- 4 Rincer abondamment.
- 5 Sécher les instruments et les préparer à la stérilisation.

Précautions d'emploi

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Dispositifs médicaux de Classe IIb / CE 0459. Réservés aux professionnels médicaux, non remboursés par les organismes d'assurance maladie. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage du produit