

step-spray

Détergent désinfectant pour le nettoyage et la désinfection :

- des dispositifs médicaux non immergeables
- des surfaces hautes non sensibles à l'alcool



PROTOCOLE D'UTILISATION

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non immergeables dans une solution détergente-désinfectante

1



Porter des équipements de protection individuels adaptés et pulvériser le Step-Spray sur une lingette sèche non tissée à usage unique.

2



Essuyer la surface du dispositif médical à traiter.

3



Envelopper le dispositif médical dans une lingette et placer le tout dans une boîte hermétiquement fermée.

4

Passer ensuite à la phase de nettoyage des dispositifs médicaux.

step-spray

Détergent désinfectant pour le nettoyage et la désinfection :

- des dispositifs médicaux non immergeables
- des surfaces hautes non sensibles à l'alcool



PROTOCOLE D'UTILISATION

Nettoyage et désinfection des surfaces hautes

1



Porter des EPI adaptés et pulvériser le Step-Spray sur une lingette sèche non tissée à usage unique.

2



Nettoyer minutieusement par essuyage mécanique la surface souillée avec la lingette imprégnée et en prenant soin de bien humidifier toute la surface à traiter.

3



Laisser agir entre 5 et 15 minutes selon l'activité antimicrobienne recherchée (cf. fiche technique).

4



Laisser sécher sans rincer.