

Aanvulling op de gebruiksaanwijzing van TauroSept® 6ml & 10ml flacon.



1. Desinfecteer het werkblad en leg de benodigdheden klaar. Neem de TauroSept® flacon uit de verpakking.



2. Trek niet-steriele handschoenen aan. Druk met de duim de rode plastic cap (flip-off) van de TauroSept® flacon.



3. Desinfecteer de vrijgekomen rubberen dop met een daarvoor geschikt medium. Bijvoorbeeld alcohol.



4. Neem de steriele injectiespuit en naald uit de verpakking. Plaats de naald op de injectiespuit.




5. Prik de naald in het midden van de rubber stop door de rubber stop.



6. Zuig de benodigde hoeveelheid TauroSept® op.



7. Vermeld op de gebruikte flacon TauroSept® de datum en tijd van eerste aanprikken.

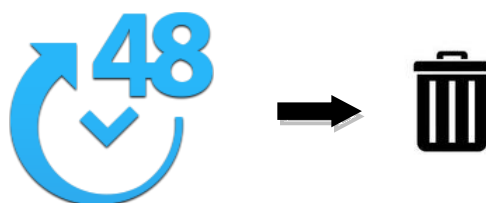

TauroSept® is nu klaar voor gebruik. Volg verder de procedure zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van TauroSept®. Na het eerste moment van aanprikken is deze flacon **48 uur** houdbaar tot een volgend gebruik, bij bewaring op **kamertemperatuur**.