


infuustherapie met een elektronische pomp

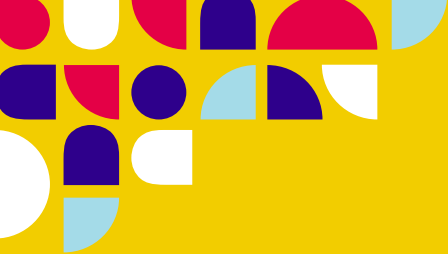



de leverancier voor infuustherapie thuis.

APPO. de apotheek van nu.



Jouw cliënt heeft van ons een of meer infuuspompen voor infuustherapie thuis ontvangen. Wij hebben de bijbehorende materialen en eventueel ook de medicatie of Totaal Parenterale Voeding (TPV) meegeleverd. In deze brochure vertellen we je over praktische zaken zoals het nabestellen van infuusmaterialen en het terugsturen van de infuuspomp(en). Ook stellen wij ons kort aan je voor en vertellen we je iets over onze werkwijze.

Belangrijk om te weten

-  **Bewaar de doos van de infuuspomp.** In deze doos moet de infuuspomp na beëindiging van de therapie retour. Lees voor het terugsturen de instructie op pagina 4 en 5.
-  Informeer ons direct als de infuustherapie thuis (tijdelijk) stopt, bijvoorbeeld in geval van een ziekenhuisopname.
-  Heeft je cliënt ook medicatie of TPV van ons ontvangen? Leg dit in de koelkast.

wat praktische zaken



* alleen van toepassing als wij ook de medicatie leveren, anders de instructie van de leverende apotheek volgen

Over de bezorging

Onze bezorger overhandigt het pakket persoonlijk aan jouw cliënt of aan een familielid. Omdat het mogelijk om medicatie gaat, is afleveren bij de burens niet mogelijk. De avond voordat we bij je bezorgen, ontvangt jouw cliënt een sms en/of e-mail met het geplande leveringsvenster.

Informatie over de infuuspomp

Heb je vragen over de infuuspomp? Wij zijn er voor je. Bel **085 902 38 80** om een van onze verpleegkundig productspecialisten te spreken. Voorkeur voor chat of videobellen via het beveiligde Siilo Messenger? Scan dan de QR-code op de achterkant van deze brochure.

Om jouw werk makkelijker te maken, hebben we alle informatie voor je op een rij gezet in een speciale webpagina. Scan de QR-code hiernaast om infuusmaterialen na te bestellen, de infuuspomp af te melden of alle downloads en instructies snel te vinden.



Onze basispakketten

Jouw cliënt heeft een basispakket-op-maat ontvangen, afgestemd op de juiste vaattoegang en infuuspomp. Voor infuustherapie bevat het basispakket voldoende materialen voor 7 dagen. Voor TPV ontvang je materialen voor 14 dagen. Krijgt jouw cliënt meerdere giften per dag? Dan hebben wij ook een of meer giftpakketten geleverd. Elk giftpakket kun je gebruiken voor 7 toedieningen. Je kunt hier dus altijd een week mee vooruit.

Infuusmaterialen nabestellen

Op onze website vind je ons assortiment voor nabestellingen. Voor 17.30 uur besteld, betekent de volgende werkdag geleverd. Is er spoed? Dan leveren wij binnen 4 uur in heel Nederland.

Over de medicatie*

De medicatiecassettes of infuuszakken moeten altijd gekoeld bewaard worden.

Afmelden infuuspomp zodra therapie stopt

Jouw cliënt heeft een of meerdere infuuspompen **van Appo in bruikleen**. Wij vragen je ons te bellen op **085 902 38 80** of te appen via Siilo Messenger zodra de therapie is beëindigd. Geef de naam en geboortedatum van de cliënt door en het telefoonnummer van de persoon met wie wij de ophaalafpraak kunnen maken. Of regel het via de thuiszorg webpagina. Als wij ook de medicatie leveren, weten we wanneer de therapie is beëindigd. Dan nemen wij zelf contact op met de cliënt om een ophaalafpraak in te plannen.



Belangrijk om te weten

Is de pomp gebruikt voor chemotherapie of kan er sprake zijn van MRSA? Gebruik dan de **rode** retourzak in plaats van de blauwe.



Infuuspomp retour sturen

Voor het terugsturen gebruik je de originele verzenddoos, de bijgeleverde retoursticker en de blauwe (of bij een mogelijk besmette pomp: rode) retourzak.

Stap 1: verzamel de pomp en alle materialen

- Zorg dat de infuuspomp volledig uitstaat.
- Verwijder alle naalden, katheters, cassettes, medicatie en infuuslijnen.
- Stop de naalden en andere scherpe voorwerpen in de naaldencontainer.
- Lever ongebruikte medicijnen en gevulde naaldencontainer in bij klein chemisch afval op de milieustraat of bij de stadsapotheek.
- Stop alleen de onderdelen zoals hieronder afgebeeld in de blauwe (of bij een besmette pomp rode) retourzak.

Onderdelen Bodyguard 323 CV



Onderdelen Cadd Solis Vip



Stap 2: maak de materialen klaar voor transport

- Vouw de doos open en stop de retourzak met materialen in de doos.
- Plak de retoursticker op de bovenzijde van de doos.
- Zet de eventuele infuuspomp en accessoires klaar.

Stap 3: geef het pakket mee aan de chauffeur

- Onze chauffeur haalt het pakket, de accessoires en de eventuele infuuspomp op de afgesproken datum bij je thuis op.

wij zijn APPO, de apotheek van nu

Wij zijn APPO, een landelijk werkende apotheek. Eentje die infuusmedicatie en TPV bereidt op cliëntnaam en die therapieën thuis gewoon goed organiseert. Een apotheek waar je superefficiënt kunt aanvragen. Die alle farmaceutische zorg biedt. En die razendsnel levert. In een elastomeerpomp of met een elektronische infuuspomp, accessoires en materialen. Alles in één zending. Wij zijn de apotheek van nu.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Wij zijn er voor je. Bel **085 902 38 80** of mail naar **infuustherapie@appo.nl**. Chatten of (beveiligd) videobellen via Siilo Messenger kan natuurlijk ook. Scan de QR-code op de achterkant van deze brochure. Kijk op **www.appo.nl/contact** voor onze openingstijden. Voor spoed kun je ons ook 's avonds en in het weekend bellen.





chat of videobel direct
met onze verpleegkundige via
het beveiligde Siilo Messenger

APPO, de apotheek van nu

Openingstijden:

zie **www.appo.nl/contact**, bij spoed 24/7 bereikbaar

085 902 38 80

infuustherapie@appo.nl

www.appo.nl

